

Instrucciones de uso**ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY PARA ASTIGMATISMO**

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SON PRODUCTOS SANITARIOS Y SIEMPRE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

Nombre de la marca	Material	Solución de Envasado	Forma de Uso
ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY PARA ASTIGMATISMO	Senofilcon A con filtro UV/HEV	Con éter metílico de celulosa	1 día

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO

Las lentes de contacto ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY PARA ASTIGMATISMO (Senofilcon A) están indicadas para uso diario desechable para la corrección de la visión (errores refractivos) en personas con ojos sanos que pueden tener dificultad para ver de lejos (miopía) o dificultad para ver de cerca (hipermetropía) y tener hasta 3,00 D o menos de astigmatismo.

NO UTILICE LOS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DUERME.

Los lentes están formulados con monómeros absorbentes de radiación ultravioleta (UV) y de luz visible de alta energía (HEV*) diseñados para atenuar la transmisión de radiación UV potencialmente nociva hacia la córnea y las estructuras intraoculares, así como para reducir la transmitancia de luz HEV*.

ADVERTENCIA: Los LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA-UV no sustituyen a los anteojos de protección contra los rayos ultravioleta, tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioletas, ya que

no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Se recomienda que siga utilizando anteojos de protección contra los rayos ultravioleta, según las indicaciones.

NOTA: La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es uno de los factores de riesgo asociados a las cataratas. La exposición se ve afectada por una serie de factores como las condiciones del entorno (la altitud, la geografía, la nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que utilizar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.

***NOTA:** No se ha demostrado que el filtrado de luz HEV mediante lentes de contacto aporte algún beneficio para la salud del usuario, incluyendo, entre otros, protección de la retina, protección contra la progresión de cataratas, reducción de la fatiga visual, mejora del contraste, mejora de la agudeza visual, reducción del deslumbramiento, mejora de la visión en condiciones de poca luz o mejora del ciclo circadiano/ciclo de sueño. Consulte a su profesional de la salud visual para obtener más información.

Su profesional de la visión determinará su esquema de uso (cuanto tiempo usted debería utilizar los lentes de contacto cada día). Cuando se prescriben para uso único y reemplazo diario, los lentes de contacto deben ser desechados después de ser retirados. Por lo tanto, no es necesario limpiarlos ni desinfectarlos.

2. CUANDO NO SE DEBEN UTILIZAR LENTES (CONTRAINDICACIONES)

NO UTILICE estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Inflamación o infección alrededor de los ojos o en los párpados.

- Alguna enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.
- Alguna condición diagnosticada previamente que haga incómodo el uso de lentes de contacto.
- Ojo seco severo.
- Sensibilidad corneal reducida.
- Alguna enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.
- Reacciones alérgicas en la superficie ocular o los tejidos circundantes que puedan ser inducidas o empeorar con el uso de lentes de contacto o el uso de soluciones para lentes de contacto.
- Cualquier infección ocular activa.
- Si sus ojos están rojos o irritados.
- Irritación del ojo causada por reacciones alérgicas a los ingredientes de las soluciones para lentes de contacto (ejemplo, gotas humectantes). Estas soluciones pueden contener sustancias químicas o conservantes (como mercurio, timerosal, etc.) a los que algunas personas pueden desarrollar una respuesta alérgica.

3. ADVERTENCIAS - Lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto:
LOS PROBLEMAS OCULARES, INCLUIDAS LAS ÚLCERAS CORNEALES, PUEDEN APARECER RÁPIDAMENTE Y PROVOCAR PÉRDIDA DE LA VISIÓN. SI USTED PRESENTA:

- Incomodidad ocular,
- lagrimeo excesivo,
- cambios en la visión,
- pérdida de visión,
- enrojecimiento ocular, u
- otros problemas oculares.

REMUEVA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

- Sus lentes han sido prescritos para uso diario y desechable (es decir, el profesional de la visión le indica que debe retirarlos y desecharlos al final de cada día) y no deben utilizarse mientras duerme (salvo en el caso indicado). Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de sufrir problemas oculares graves aumenta al usar lentes de contacto durante la noche.¹
- Diversos estudios indican que los usuarios de lentes de contacto que fuman presentan un mayor riesgo de problemas oculares que los no fumadores.
- Los problemas con los lentes de contacto o los productos para su cuidado podrían provocar lesiones oculares graves.
- El uso y cuidado adecuados de sus lentes de contacto y de los productos destinados a su mantenimiento son esenciales para garantizar un uso seguro.
- El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto.

¹New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783.

Instrucciones de uso y advertencias específicas:

- **Actividad acuática**

Instrucciones de uso

No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

ADVERTENCIA:

El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realiza cualquier actividad que implique contacto con el agua.

4. PRECAUCIONES

Para mantener la salud de sus ojos, es importante seguir cuidadosamente las instrucciones de manipulación, colocación, retiro, almacenamiento, y uso indicadas en este folleto, así como aquellas proporcionadas por su profesional de la visión (**consulte**

las secciones 'Manipulación y Colocación de los Lentes', 'Uso de los Lentes' y 'Cuidado de sus Lentes').

Precauciones generales:

- Si usa sus lentes de contacto para corregir la presbicia utilizando monovisión **es posible que no** pueda conseguir la mejor agudeza visual corregida para la visión lejana o cercana. Las necesidades visuales varían entre cada persona, por lo que su profesional de la visión debe trabajar con usted al seleccionar el tipo de lente de contacto más apropiado.
- **Siempre** póngase en contacto con su profesional de la visión antes del uso de cualquier medicamento para los ojos.
- **Tenga en cuenta** que ciertos medicamentos, tales como antihistamínicos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y los tratamientos que previenen el mareo, pueden causar resequedad ocular, mayor percepción de llevar lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa. Informe siempre a su profesional de la visión si tiene algún problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.
- **Tenga en cuenta** que si utiliza anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas), podría desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
- **No** cambie su tipo de lente de contacto (por ejemplo, marca comercial, etc.) ni los parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, potencia del lente de contacto, etc.) sin consultar a su profesional de la visión.
- **Siempre** tenga un par de gafas funcionales con una graduación actual disponible para usar si no puede usar lentes de contacto, o en circunstancias en las que se desaconseja el uso de lentes de contacto.
- Como con cualquier lente de contacto, las visitas de seguimiento son necesarias para asegurar la salud continua de sus ojos. Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.

¿Quién debe saber que usted usa de lentes de contacto?:

- **Informe** a todos sus médicos (profesionales de la salud) acerca de ser usuario de lentes de contacto.
- **Siempre** informe al empleador sobre ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

5. REACCIONES ADVERSAS (Posibles problemas con el uso de lentes y cómo abordarlos)**Posibles problemas**

Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con los siguientes síntomas:

- Ardor, escozor, picazón y/o sequedad en los ojos,
- comodidad de los lentes reducida,
- sensación de tener algo dentro del ojo (cuerpo extraño, área rasguñada),
- hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos,
- enrojecimiento ocular,
- problemas en los párpados,
- ojos llorosos y secreciones oculares inusuales,
- mala visión,
- visión borrosa,
- arco iris o halos alrededor de los objetos,
- sensibilidad a la luz (fotofobia).

Si ocurre cualquiera de los síntomas anteriores, podría tratarse de una afección ocular grave. **Debe acudir de inmediato a su profesional de la visión** para que identifique el problema y, si fuera necesario, lo trate a fin de evitar daños o pérdida visual grave.

Reconocer problemas y ¿qué hacer?

Debe realizar un sencillo autoexamen en 3 pasos al menos una vez al día. Pregúntese lo siguiente:

- ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?

- ¿Qué aspecto tienen mis ojos?
- ¿He notado algún cambio en mi visión?

Si observa algún problema, debe **REMOVERSE SU LENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO**. Si el problema o la incomodidad cesan, deseche el lente de contacto y coloque uno nuevo en el ojo. Si, después de insertar el nuevo lente de contacto, el problema persiste, **REMUEVA EL LENTE DE INMEDIATO Y CONSULTE A SU PROFESIONAL DE LA VISION**.

MANEJO Y COLOCACIÓN DE LOS LENTES DE CONTACTO

Para su salud ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones de este folleto para la manipulación, colocación, remoción y uso, así como las indicaciones proporcionadas por el profesional de la visión. Si no puede o no podrá seguir siempre los cuidados recomendados, no debe intentar usar lentes de contacto.

La primera vez que adquiera lentes de contacto, antes de abandonar la consulta con el profesional de la visión, asegúrese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto (o que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted).

Paso 1: ¿Cómo comenzar?

- Es esencial que aprenda y aplique una buena higiene en el cuidado y manejo de sus nuevos lentes. La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de los lentes de contacto. En particular, las manos deben estar limpias, secas y sin jabones, lociones o cremas antes de manipular sus lentes.

Antes de empezar:

- Siempre lave bien sus manos con un jabón suave, enjuague completamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
- Debe evitar el uso de jabones que contengan cremas de limpieza, lociones o cosméticos antes de manipular sus lentes de contacto. Estas sustancias pueden

entrar en contacto con los lentes e interferir con su uso correcto. Es mejor colocarse los lentes de contacto antes de maquillarse.

Comience correctamente adquiriendo el hábito de mantener siempre una higiene adecuada, de modo que se vuelva automático.

Paso 2: Apertura del envase

Confirme siempre que los parámetros del lente de contacto (por ejemplo, diámetro (DIA), curva base (BC), potencia del lente de contacto (D), etc.) impresos en la caja y en el envase/blíster del lente de contacto individual coincidan con su prescripción. NO usar si hay alguna discordancia.

Envase múltiple (Caja)

Cada caja contiene lentes de contacto envasados individualmente. Cada lente de contacto viene en su propio envase/blíster, diseñado específicamente para mantener la esterilidad mientras esté cerrado.

Envase/Blíster de lentes de contacto

NO use el lente si el envase estéril (blíster) está abierto o dañado.

Para abrir un envase/blíster de un lente de contacto individual, siga estos sencillos pasos:

1. Agite el envase/blíster de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto está flotando en la solución.
2. Retire la cubierta protectora para acceder al lente de contacto.
3. Ponga un dedo en el lente de contacto y deslícelo hacia arriba por el lado de la cavidad del envase/blíster de lentes de contacto hasta removerlo/retirarlo del contenedor.

NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar los lentes de contacto de su envase/blíster. A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la solapa al abrirla o al propio envase/blíster de plástico. Esto no afectará a la esterilidad del lente de contacto. Se puede utilizar todavía con perfecta seguridad. Retire el lente de contacto con cuidado e inspecciónelo siguiendo las instrucciones de manipulación.

Consejos para el manejo de los lentes de contacto

- Manipule los lentes de contacto con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar tocarlos con las uñas. Es útil mantener las uñas cortas y limadas.
- Hábituese a trabajar siempre con los lentes de contacto en el mismo orden para evitar confusiones.
- Cuando haya retirado los lentes de contacto del envase/blíster, verifique que sea un solo lente de contacto húmedo y limpio y que esté libre de rasgaduras o desgarros. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.

Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo

Recuerde, siempre comenzar con el mismo ojo.

Una vez que haya abierto, extraído, y examinado los lentes de contacto del envase/blíster, siga estos pasos para colocarlos en sus ojos:

1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un cuenco. Si los bordes del lente de contacto tienden a apuntar hacia fuera, el lente de contacto está del revés.
- Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben inclinarse hacia dentro. Si el lente de contacto está del revés, los bordes se inclinarán ligeramente hacia fuera.
- Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y, mirando al lente de contacto, busque los números 1-2-3. 1-2-3 indica la orientación correcta, mientras que 1-2-3 invertidos indica que el lente de contacto está del revés. Si el lente de contacto está del revés (1-2-3 invertidos), voltee el lente de contacto y busque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente de contacto es la correcta.

2. Con el lente de contacto en su dedo índice, utilice la otra mano para sujetar el párpado superior para evitar el parpadeo.
3. Baje el párpado inferior con los demás dedos de la misma mano con la que va a colocarlo/insertarlo.
4. Mire hacia el techo y coloque suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
5. Suelte lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Use la misma técnica cuando coloque el lente de contacto en el otro ojo.

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto

Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:

- ¿Veo bien?
- ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
- ¿Qué aspecto tienen mis ojos?

Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe lo siguiente:

- El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte “Paso 5: Centrado del lente de contacto”, más adelante en este folleto).

Si el lente de contacto está centrado, retírelo (consulte “Retiro de los lentes de contacto”) y compruebe lo siguiente:

- Cosméticos o aceites sobre el lente de contacto. Deseche el lente de contacto y coloque uno nuevo.
- El lente de contacto se encuentra en el ojo equivocado.
- El lente de contacto se encuentra al revés (tampoco se sentiría cómodo como de costumbre). Vea el Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo”.

Si advierte que su visión aún es borrosa después de verificar las posibilidades anteriores, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, **RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.**

Paso 5: Centrado del lente de contacto

Un lente de contacto que esté sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.

O bien

- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO

Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos:

Condiciones peligrosas

- Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el aerosol se haya asentado.
- **Evite** todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleve puestos los lentes de contacto.
- **Nunca** enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad acuática

- No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

Soluciones lubricantes o humectantes

- Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) sus lentes de contacto mientras los usa.
- **No utilice** saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o rehumedecer sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en su boca.

Uso compartido de los lentes de contacto

- **Nunca** permita que nadie más utilice sus lentes de contacto. Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.

Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos

- **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
- **Deseche siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
- Todo producto no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con los requisitos locales.

RETIRO DE LOS LENTES DE CONTACTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto esté en la córnea (centro del ojo) antes de intentar retirarlo/removerlo. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o ni siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior tirando hacia abajo del párpado inferior.

Siempre retire primero el mismo lente.

1. Lávese bien las manos, enjuáguelas y séquelas. Siga el método que le recomiende su profesional de la visión. A continuación, se presenta un ejemplo de un método:

Método de pellizco:

Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.

Paso 2. Apriete suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.

Paso 3. Retire el lente de contacto.

2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, “Cuidado de los lentes de contacto”.

NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo. Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.

CUIDADO DE SUS LENTES DE CONTACTO

Recuerde que no se necesita limpieza o desinfección de sus lentes de contacto, cuando están prescritos para un uso único y reemplazo diario. Siempre deseche los lentes de contacto cuando se los remueva y tenga lentes de reemplazo o anteojos disponibles.

EMERGENCIAS

Si algún producto químico de cualquier tipo (productos domésticos, soluciones de jardinería, productos químicos de laboratorio, etc.) entra en contacto con los ojos: **ENJUAGUE INMEDIATAMENTE CON AGUA DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.**

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA: La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:

Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

 **USA:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.

IRLANDA: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland.

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la etiqueta o en la caja:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución, Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
	Código de lote
	Esterilización mediante vapor
	No reutilizar (uso único)
	No usar si el envase está dañado
	Impuesto de gestión de residuos
	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión.
	Producto sanitario en la Comunidad Europea
	Indica un sistema único de barrera estéril
UV BLOCKING	Bloquea los rayos UV
	Representante Autorizado en la Comunidad Europea

CE	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
CONTACT LENS	Lentes de Contacto
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AXIS	Eje
CYL	Cilindro
ASTIGMATISM	Indica lente(s) para astigmatismo
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
	Apertura del envase (blíster)
	Ícono de apertura (Cartón)
	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY PARA ASTIGMATISMO
(senofilcon A con filtro HEV/UV)

Para uso único y descarte diario. Con tinte de visibilidad y bloqueo ultravioleta-UV. Producto estéril. No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa. Esterilizado usando vapor.

Contenido: Lentes de contacto (38% H₂O) en una con éter metílico de celulosa. No se requieren condiciones especiales de almacenamiento. **Fabricado en E.U.A. por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 y/o **Fabricado en Irlanda por: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC (Unlimited Company)** The National Technology Park, Limerick, Irlanda // **Importado y distribuido por:**

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Mendoza 1259, CABA, ARG. DT: María Julia Soto. R.S. ANMAT – PM 16-794. **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S** Av. Calle 26 #69-76 Edificio Elemento, Torre 2 pisos 3 al 11, Bogotá, COL. INVIMA 2019DM-0019219. **Venta bajo receta de un prof. de la visión / uso bajo prescrip. de Prof. de la Salud. # R.S. y datos de importadores y distribuidores dentro del instructivo.** **Johnson & Johnson de Chile S.A.** Cerro Colorado #5240 Piso 9, Torre I, Las Condes, Santiago, CHL.

Contáctenos: **Argentina:** 0-800-444-2604 - contactenos.ar@acuvue.com - www.acuvue.com/es-ar / **Chile:** 56 23-284-0501 - contactenos.cl@acuvue.com - www.acuvue.com/es-cl / **Colombia:** 01 800 518 4094 - contactenos.co@acuvue.com - www.acuvue.com/es-co / **Costa Rica:** 1-800-843-2020 - RA-VISUS-AcuvueCCA@its.jnj.com. - www.acuvue.com/es-cr.

Venta y uso bajo prescripción del profesional idóneo. Léase Instructivo anexo.

Lote ver , fecha de caducidad ver  en el empaque