


OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH

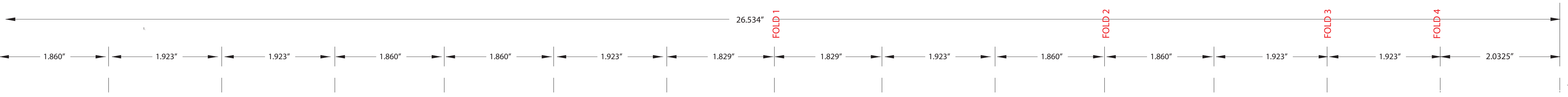

Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y, mirando al frente de contacto, busque los números 1-2, 1-2, 3 indica la orientación correcta, mientras que 1-2-3 invertidos indica que el lente de contacto está del revés. Si el lente de contacto está del revés (1-2, 3 invertidos), vuelva el lente de contacto o busque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente de contacto es la correcta.

Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe la siguiente:

- El lente de contacto no está cambiado en el ojo (consulte "Paso 5: Cuidado del lente de contacto" más adelante en esta guía).
- Si el lente de contacto está cambiado, revéalo (consulte "Retirada de los lentes de contacto" y compruébelo lo siguiente):
- Coloque el lente de contacto en un recipiente con solución salina.
- Con la punta de los dedos pulgares y meñiques, retire el lente de contacto y colóquelo en una solución salina recomendada para el cuidado de lentes de contacto y, si se eliminó el cosmético o el aceite, vuelva a colocar el lente de contacto. Si su visión aún está borrosa deséchelo el lente de contacto y colóquelo uno nuevo.
- Póngalo que el lente de contacto esté en el ojo equivocado.
- El lente de contacto está del revés (veremos cómo de la normal).
- Consulte "Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo".

Retirado de los lentes de contacto:
1. Lávese bien las manos, séquelas y séquelas.
2. Coloque el dedo índice sobre el lente de contacto y presione con el dedo sobre el borde del párpado superior e inferior.

Actividad acuática:
• No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.
• Evite actividades acuáticas que puedan provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera.
• Manténgalos siempre los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución salina recomendada cuando no se estén usando (guardados). Los períodos prolongados de secado (por ejemplo, exponiendo el lente de contacto al aire durante 30 minutos o más) reducen la capacidad de la superficie del lente de contacto para volver a un estado humectable. Si la superficie del lente de contacto se seca, deséchelo el lente de contacto y use uno nuevo.

Uso compartido de los lentes de contacto:
• Nunca permita que nadie más utilice sus lentes de contacto.
• Deséchelos después de limpiar y desinfectarlos, o una solución múltiple recomendada por su profesional de la visión.
• Nunca utilice soluciones recomendadas para lentes de contacto que ya no sean de uso personal.


Retirado de los lentes de contacto:
1. Lávese siempre las manos a fondo con agua templada, un jabón suave, enjuáguelas cuidadosamente y séquelas con un trapo limpio que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
2. Coloque el dedo índice sobre el lente de contacto y presione con el dedo sobre el borde del párpado superior e inferior.

Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.
Cuidado de los lentes de contacto:
1. Limpie siempre primero el mismo lente de contacto, para evitar contaminación.
2. Siga las instrucciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre limpieza y desinfección o las recomendaciones de su profesional de la visión.

5. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios):
• Informe inmediatamente a su profesional de la visión cualquier reacción adversa que experimente mientras usa lentes de contacto de marca ACUVUE.
• Consulte las instrucciones de uso de su lente de contacto para obtener más información sobre cómo reportar una reacción adversa.

Table with columns for symbols and definitions. Includes symbols for:
- Información importante sobre su lente de contacto
- No usar el empaque más allá de la fecha de caducidad
- Impagos de garantía de reemplazo
- PRECAUCIÓN: En los países de los Estados Unidos solo está la venta de este dispositivo a través de un proveedor autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión.

Lentes de Contacto ACUVUE VITA (multifocal)
Un día por hora hasta 1 mes. Con lentes de estabilidad y bloqueo ultravioleta-UV Estabil.
Esterilizado usando vapor. Contenido: Lentes de contacto (41% H2O) en una solución salina de borato con ester estabilizante. No se debe usar para contacto con agua.

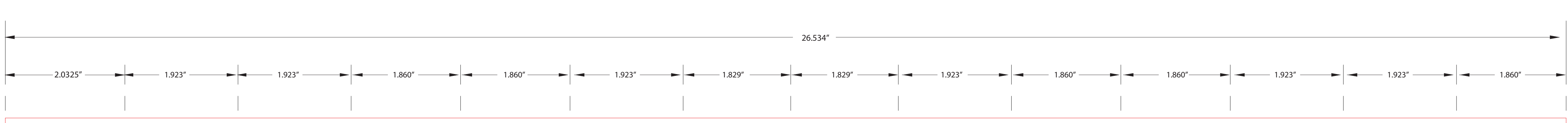

Johnson & Johnson de Chile S.A. Centro Comercial Pizarro 49, Torre 1, Las Condes, Santiago, Chile.
Contactos: Argentina: 0 800 444 2664 - contactos.ar@acuvue.com
www.acuvue.com.ar / Chile: 52 224 5501 - contactos.cl@acuvue.com
www.acuvue.com/cl / Colombia: 01 800 519 4054 - contactos.co@acuvue.com
www.acuvue.com/co / Costa Rica: RA-VISUS-AcuvueCARE@ra.acuvue.com
www.acuvue.com/cr / España: Atención al Consumidor CCA - 1-800-272-9292 / País: 008-000-44-0145 - contactos.es@acuvue.com
www.acuvue.com/es / Perú: 0800-55722 - contactos.pe@acuvue.com
www.acuvue.com/pe / Uruguay: 000-413-598-4659 - contactos.uy@acuvue.com
www.acuvue.com/uy /

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO INDICADO
LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE SON PRODUCTOS SANITARIOS Y SIEMPRE DEBE SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN.
LEA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

REMOJA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.
• Los lentes de contacto prescriptos para uso diario (por decir, el profesional de la visión le indica que se remueva los lentes de contacto al final de cada día) no deben llevarse mientras duerme. Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de problemas oculares graves aumenta cuando se usa un lente de contacto durante la noche.
• Estudios han demostrado que el uso de lentes de contacto que tienen lentes con hidrogel de hidratación puede reducir el riesgo de problemas oculares graves que los no hidratados.
• El producto sigue siendo apto para uso diario por hasta un mes.

REMOJA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.
• Es recomendable que visite a su profesional de la visión con la frecuencia que sea la haya indicado.
• No mueva la solución del estuche portales lentes ni rellene con más solución la su usada, ya que esto disminuye el poder de esterilización y podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.
• Tenga en cuenta que ciertos medicamentos, tales como antibióticos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y los tratamientos que previenen el mareo, pueden causar sequedad ocular, mayor sensibilidad a irritación o cambios en los siguientes síntomas:
• Picoz, ardor, picazón, ojo seco o sensibilidad a la luz.

¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
• ¿He notado algún cambio en mi visión?
Si usted nota algún problema, debe REMOVERSE SU LENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO. Si el problema o la molestia desaparece el lente de contacto agárralo no estar dañado, límpelo y enjuague el lente de contacto con una solución para cuidado de lentes de contacto higienizado recomendada, y recolecte el lente de contacto. Si luego de recolectar el lente de contacto el problema persiste, deséchelo el lente de contacto y colóquelo un nuevo lente de contacto en el ojo.
INSTRUCCIONES DE USO
Para su salud ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones para la manipulación, la colocación, la extracción y las instrucciones de uso que se encuentran en este folleto, así como las indicaciones del profesional de la visión. Si no puede o no podrá seguir siempre los procedimientos de cuidado recomendados, no debe intentar que lentes de contacto.

EMPAQUE MÚLTIPLE (Caja)
Cada caja contiene lentes de contacto envasados individualmente. Cada lente de contacto viene en su propio emvasador, diseñado específicamente para mantener la esterilidad mientras está cerrado.
Paso 1: Cómo comenzar
• Limpie el emvasador de los lentes de contacto y asegure que el lente de contacto está húmedo en la solución.
• Retire la tapa con cuidado para acceder al lente de contacto.
• Coloque el dedo en el emvasador y deslízalo hacia arriba por el lado de la cantidad del emvasador de lentes de contacto hasta removerlo del emvasador del emvasador.

MANEJE LOS LENTES DE CONTACTO CON CUIDADO, CON LA PUNTA DE LOS DEDOS, y tenga cuidado para evitar tocarlos con las uñas.
• Manténgalos siempre con los lentes de contacto en el mismo orden para evitar confusiones.
• Cuando haya retirado los lentes de contacto del emvasador, estuche portales lentes, vea que solo un solo lente de contacto húmedo y limpio y que esté libre de melas o residuos. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.
Paso 2: Colocación del lente de contacto en el ojo
Rápidamente, empiece siempre con el mismo ojo.
Una vez que haya abierto, extraído, y examinado los lentes de contacto del emvasador, siga estos pasos para colocárselos en sus ojos.
1. AGÚSE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTE AL REVÉS mediante uno de los siguientes procedimientos:
• Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. El lente de contacto debe aparecer como una forma natural, curvada, similar a la de un cuerno. Si los bordes del lente de contacto tienden a apuntar hacia fuera, el lente de contacto está del revés.
• Píntese suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben inclinarse hacia dentro. Si el lente de contacto está al revés, los bordes se inclinarán fuertemente hacia fuera.

