


# OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH

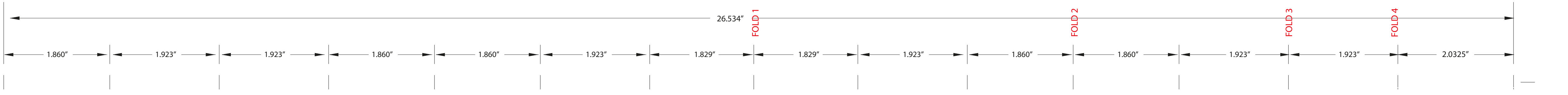

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método aquí expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionar una alternativa.

**Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto**  
Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntele:  
• ¿Veo bien?  
• ¿Cuál sensación me producen los lentes de contacto?  
• ¿Qué aspecto tienen mis ojos?  
Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe lo siguiente:  
• El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Control de los lentes de contacto" más adelante en este folleto).  
• El lente de contacto está centrado, retirelo (consulte "Retirada de los lentes de contacto" y compruebe lo siguiente).  
• Compruebe a ambos en el lente de contacto. Simplemente enjague con su solución suave recomendada para el cuidado de los lentes de contacto, y se elimine el contacto o el estuche, vuelva a colocar el lente de contacto. Si su visión aún está borrosa deséchelo el lente de contacto y colóquelo uno nuevo.  
• Pádelo que el lente de contacto esté en el ojo equivocado.

**USO DEL LENTE DE CONTACTO**  
**Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos:**  
**Condiciones peligrosas:**  
• Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.  
• **Evite** todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleva puestos los lentes de contacto.  
• **Nunca** enjague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.  
**Actividad acuática**  
• No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.  
**ADVERTENCIA:**  
• El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si un lente de contacto se ha sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o al mar, **debe desecharlo y reemplazarlo por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realiza cualquier actividad que implique contacto con el agua.**

**NO coliente la solución desinfectante ni los lentes de contacto.**  
**Precaución:** Los lentes de contacto se desinfectan químicamente pueden absorber ingredientes de la solución desinfectante que podrían ser irritantes para los ojos. Un cuidadoso enjuague con solución salina estéril fresca (o una solución recomendada) antes de colocarlos/insertarlos en sus ojos debería reducir la posible irritación.  
3. Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuague recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.  
**ADVERTENCIA:**  
• Frote y enjague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados para combatir o evitar infecciones oculares graves.  
• Nunca utilice agua, solución salina, ni gotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas prácticas no desinfectan los lentes de contacto. No utilice el desinfectante recomendado para prevenir infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.  
4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.  
**Paso 2: Almacenamiento**  
• Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectelos y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando.** Los productos etiquetados como "solución de almacenamiento" no están diseñados para ser utilizados como solución de almacenamiento.  
**PRECAUCIÓN:** Algunos sistemas de que el lente de contacto está en la cámara (control del ojo) antes de intentar retirarlo/moverlo. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o si siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras mira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior mirando hacia abajo del párpado inferior.  
**ADVERTENCIA:**  
• Si el lente de contacto se seca, deséchelo y use uno nuevo.

**Fecha de revisión: 02/2024**  
VEEVA / 2024L8470  
VEEVA / 2024L8470R

**NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)**  
Cualquier incidente reportado inmediatamente al fabricante de los lentes de contacto o a su representante autorizado en su país.


**INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA**  
La corrección visual a través de microlentes debe ser discutida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

**Fabricado por:**  
Contact Lens Exchange para ver el lugar de fabricación.

**USA:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurian Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.  
**IRELAND:** Johnson & Johnson Vision Care Ireland Ltd, The National Technology Park, Limerick, Ireland. J. Johnson & Johnson Vision Care Ireland Ltd, The National Technology Park, Limerick, Ireland.  
**AMO Ireland:** Block B, Ullevy Valley Office Campus, Charleville, Co. Dublin, Ireland.  
www.acucore.com

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
CE	Prescripción. Consulte las instrucciones de uso
EU	Estadísticas
EU	Fecha de fabricación
EU	Última fecha de fecha de caducidad
EU	Código de lote
EU	Exclusión mediante vapor
EU	No usar si el envase está dañado
EU	Impresión de puntos de medición
EU	PRECAUCIÓN: La ley de los Estados Unidos solo autoriza la venta en este dispositivo a través de un facultativo autorizado bajo prescripción de un profesional de la visión.

**Lentes de Contacto ACUVUE VITA para ASTIGMATISMO (MultiFocus)**  
Este diseño por hasta 1 mm. Control de estabilidad y bloqueo ultravioleta UV (Estril) - Esterilizado usando vapor. **Contenido:** Lentes de contacto (14% H2O) en una solución salina de borato con 0.9% de cloruro de sodio. No se requieren condiciones especiales de almacenamiento. **Elaborado por:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurian Parkway, Jacksonville, Florida, E. U. A., 32256 & Johnson & Johnson Vision Care Ireland Ltd, The National Technology Park, Limerick, Irlanda. **Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) Ltd**, The National Technology Park, Limerick, Irlanda. **Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) Ltd**, The National Technology Park, Limerick, Irlanda. **ARG:** OT Farm, G. Nuñez, R.S. ANMAY - PAI 16-762, JOHNSTON & JOHNSON HEALTHCARE S.A.S. S.A. Calle 26 #93-58 Estación Simón Bolívar, Torre 3 Pisos 3-11, Bogotá, CO. INVAMA 2018-001784. **OPTILAB PARAGUAY S.A.**, C. de la Industria, 2372, Misiones, Uruguay. DT. A. Benítez Noya, R.S. 70115. **Venta bajo receta de un prof. de la visión. A uso bajo prescripción de un Prof. de la visión. R.S. y datos de importadores y distribuidores dentro del instructivo. SAP / 23061710**

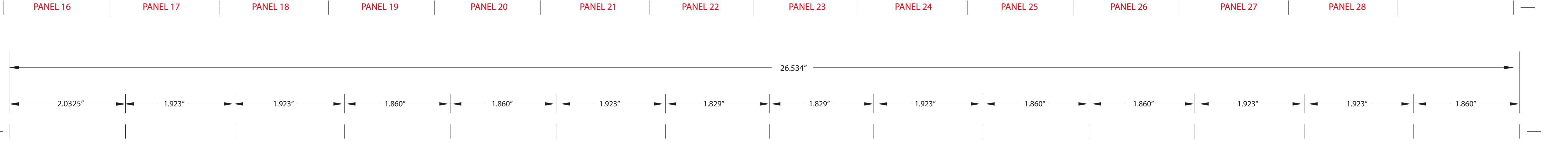

**Johnson & Johnson de Chile S.A.**, Cerro Colorado #2540 Piso 9, Torre 1, Las Condes, Santiago, Chile.  
**Contactos:** Argentina: 0-800-444-5604 - contactenos@acucore.com - www.acucore.com/es - Chile: 02-234-0420 - contactenos@acucore.com - www.acucore.com/es - Colombia: 01-510-518-4094 - contactenos@acucore.com - Perú: 0800-441-0148 - contactenos@acucore.com - Paraguay: 0900-093722 - contactenos@acucore.com - www.acucore.com/es - Uruguay: 000-412-0598-4094 - contactenos@acucore.com - www.acucore.com/es

Número de marca	Material	Solución	Forma de Envase
ACUVUE VITA para ASTIGMATISMO	silencioso C	Solución salina de borato con 0.9% de cloruro de sodio	1 mes (para uso diario)

**ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA-UV**  
• Intención o aplicación en el interior de los ojos.  
• **NO UTILICE** estos lentes como los lentes de contacto o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta. **NO** use estos lentes de contacto para actividades al aire libre. Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. **Sin embargo, no se ha realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO INDICADO**  
Los lentes de contacto ACUVUE VITA para ASTIGMATISMO están indicados para la corrección de la visión en personas con astigmatismo leve a moderado que ven mejor leyendo, mirando o haciendo actividades que requieren visión cercana. **NO USE SUS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DURENTE.**

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta-UV ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

**2. CONTRAINDICACIONES (¿Quién no se deben utilizar?)**  
• **NO UTILICE** estos lentes como los lentes de contacto o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta. **NO** use estos lentes de contacto para actividades al aire libre. Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. **Sin embargo, no se ha realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.**

**3. ADVERTENCIAS - lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto.**  
• **NO UTILICE** estos lentes como los lentes de contacto o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta. **NO** use estos lentes de contacto para actividades al aire libre. Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. **Sin embargo, no se ha realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.**

**4. PRECAUCIONES**  
• **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/ blister.  
• **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/ blister.  
• **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/ blister.  
• **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/ blister.

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**Para su salud ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones para la manipulación, la colocación, la extracción y las precauciones de uso que se encuentran en este folleto, así como las instrucciones del profesional de la visión. No pretenda ni intente ajustar sus lentes de contacto.**

**La primera vez que le proporcionen los lentes de contacto, antes de usarlos, consulte al profesional de la visión, asegúrese de que es capaz de colocarlo y retirarlo los lentes de contacto (o que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted).**

**Retener problemas y qué hacer?**  
Informe a todos sus médicos y al proveedor sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

**¿Dónde debe usar los lentes de contacto?**  
Informe a todos sus médicos y al proveedor sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

**5. REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos**  
Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:  
• Problemas en los párpados.  
• Ojos borrosos y visuales o irritados.  
• Mala visión, visión borrosa.  
• Aumento de lagrimeo o ojos rojos.  
• Sensibilidad a la luz (fotofobia).  
• Como con cualquier lente de contacto, las visitas de seguimiento son necesarias para asegurar la salud continua de sus ojos.  
• Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento de sus lentes de contacto.

**¿Qué aspecto tienen mis ojos?**  
• Problemas en los párpados.  
• Ojos borrosos y visuales o irritados.  
• Mala visión, visión borrosa.  
• Aumento de lagrimeo o ojos rojos.  
• Sensibilidad a la luz (fotofobia).  
• Como con cualquier lente de contacto, las visitas de seguimiento son necesarias para asegurar la salud continua de sus ojos.  
• Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento de sus lentes de contacto.