

# GLISTER™

## HILO DENTAL MULTIACCIÓN

**¡PARA UNA ACCIÓN DE LIMPIEZA  
SEGURA Y EFECTIVA!**

Ayuda a eliminar la placa de las superficies de los dientes, que el cepillado no puede alcanzar, mientras estimula suavemente las encías.



PROPORCIONA HASTA  
**166 USOS**









por contenedor de 50 metros.



No. de artículo: 124112

Contenido: 2 unidades con 50 metros c/u

## BENEFICIOS:

-  Ayuda a reducir la placa interproximal (entre los dientes) hasta en un **68%\***.
-  Se desliza fácilmente entre los dientes para una **acción de limpieza** segura y efectiva.
-  Estimula suavemente las encías mientras **elimina la placa** entre los dientes y justo debajo de la línea de las encías.
-  Forma de cinta plana para entrar en espacios reducidos.
-  Recubierto con una cera de origen natural.
-  El hilo es **fuerte y resiste** a la trituración.
-  El hilo dental de acción múltiple de **Glister™** es libre de: BPA, PVC y Ftalatos
-  Este producto promueve la **higine de las encías** y mejora la **salud bucal** en general cuando se usa como parte del Sistema de cuidado bucal Glister™.

\*Los hilos dentales encerados, como el Hilo dental de acción múltiple de Glister™, pueden reducir la placa interproximal (entre los dientes) hasta en un 68 %.

## MODO DE USO:

1. Usar después del cepillado. Distribuye 30-45 cm de hilo dental y envuélvelo alrededor de los dedos medios.
2. Usando los pulgares y los dedos, pasa suavemente el hilo dental entre cada diente justo debajo de la línea de las encías.

Desliza el hilo contra la superficie de cada diente.

3. Usa el hilo dental en ambos lados de cada diente.

No olvides la parte posterior del último diente en ambos lados, arriba y abajo. Cuando el hilo dental se deshilache o se ensucie, cambia a una sección nueva de hilo dental.



*Es un producto seguro al ser utilizado según las instrucciones. Apto para las encías cuando se utilice según las instrucciones.*

*Los padres deben supervisar a los niños pequeños cuando utilicen el producto.*

Utiliza el sistema de cuidado Bucal **Glister™ Refresh** Dientes limpios, encías sanas y aliento fresco en tan sólo 3 pasos:

1

**Cepillar**



**Glister™** Pasta de Dientes Multiacción  
+  
**Glister™** Cepillo para Dientes

2

**Usar Hilo Dental**



**Glister™** Hilo Dental Multiacción

3

**Enjuagar**



**Glister™** Enjuague Bucal Multiacción  
(Concentrado)



**Spray Refrescante**



**Glister™** Refrescante Bucal en Spray

Cuando los productos **Glister™** se usan correctamente y en conjunto, el sistema promueve dientes limpios, encías sanas y aliento fresco ya que respalda el equilibrio de su microbioma oral.



SALUD ES BELLEZA 2519042002D00008