

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ACUVUE®



ACUVUE®



BORDE INFINITO
PARA UNA MAYOR
COMODIDAD

AGENTE HUMECTANTE¹
PARA UNA MEJOR
HIDRATACIÓN

**ESTABILIZACIÓN MEDIANTE
EL PARPADEO PARA
LENSES TÓRICOS**
VISIÓN ESTABLE
PARA PACIENTES
ASTIGMATAS

**OPTIMIZADO
PARA LA PUPILA**
PARA VISIÓN
MULTIFOCAL

ANTIOXIDANTES
PARA MANTENER
LA COMODIDAD

PROTECCIÓN UV[†]
PARA LA
SALUD OCULAR

LENTES DE CONTACTO **INSPIRADOS EN LOS OJOS***

EYE-INSPIRED™  INNOVATIONS



Los lentes de contacto de la marca ACUVUE® te brindan la comodidad y la nitidez de las INNOVACIONES EYE-INSPIRED™

*JJV Data on File 2020. ACUVUE Brand - Eye-Inspired Innovations. 1. Agente humectante no aplica para ACUVUE® 2, dado que no lo tiene en su formulación. † Todos los lentes de contacto Acuvue contienen un bloqueador UV que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. **ADVERTENCIA:** LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado. Las imágenes de los productos son para fines ilustrativos ACUVUE®; EYE INSPIRED™ INNOVATIONS son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care Companies, Inc. © Johnson & Johnson de Chile S.A. 2023. Todos los derechos reservados.

EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS

Presente en el Portafolio
de Productos ACUVUE®



AGENTE HUMECTANTE PARA HIDRATACIÓN

No solo recubierto, sino con una formulación que imita los componentes clave de la lágrima para ayudar a los ojos a sentirse frescos todo el día.^{1,2,3}



BLOQUEO DE RAYOS UV⁴ PARA LA SALUD DE LOS OJOS

El material del lente ayuda a proporcionar protección contra la transmisión de los rayos UV-A y UV-B.^{1,4}



BORDE INVISIBLE PARA COMODIDAD

Un borde ultra delgado que se adapta a la forma natural de su ojo para una máxima comodidad al usar lentes y una sensación casi invisible.²



ESTABILIZACIÓN POR PARPADEO PARA ASTIGMATISMO

Cuatro zonas estabilizadoras del párpado que funcionan con su parpadeo natural para una visión consistente, clara y estable.²



ANTIOXIDANTES PARA APOYO A LA COMODIDAD

Antioxidantes incrustados dentro del lente para ayudar a brindar comodidad.^{1,5}



OPTIMIZADO PARA LA PUPILA PARA VISIÓN MULTIFOCAL

Tecnología multifocal que tiene en cuenta las variaciones naturales en el tamaño de la pupila para garantizar una corrección de visión casi personalizada de cerca y de lejos¹

1. JJV data on file 2018. ACUVUE® Brand - EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS. 2. JJV data on file 2018* ACUVUE® Brand Contact Lenses Clinical Performance and Overall Material Properties. 3. No other contact lens manufacturer utilizes high molecular weight PVP in their lenses or the patented technologies used to combine it with various lens materials. It is unique to the ACUVUE® Brand. 4. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado. 5. As shown in a laboratory study and on a mass basis.

INSPIRADO EN LOS OJOS.* **DISEÑADO** PARA TI.

Todos los lentes de contacto de la marca ACUVUE® se inspiran en el ojo y trabajan junto a él, a partir de una profunda comprensión de las necesidades de los pacientes. Combinadas a la experiencia de los profesionales de la visión, nuestras **INNOVACIONES EYE-INSPIRED™** ayudan a garantizar a los pacientes una calidad de visión diferenciada. Cada ojo es diferente. Y nosotros nos inspiramos en cada uno de ellos*.

*JJV Data on File 2020. ACUVUE Brand - Eye-Inspired Innovations.

FAMILIA DE PRODUCTOS ACUVUE®



LENTES DE CONTACTO DE USO ÚNICO Y REEMPLAZO DIARIO

Página | 12



HIDROGEL DE SILICONA **ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™**

Comodidad insuperable con la practicidad de los desechables diarios*¹

PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan corrección de la visión y ejercen múltiples actividades todos los días.

Página | 14



HIDROGEL DE SILICONA **ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM**

Comodidad insuperable con la practicidad de los desechables diarios, manteniendo la visión clara y estable*^{1,2}

PERFIL DEL USUARIO

Para pacientes astigmatas quienes están expuestos a ambientes desafiantes, incluyendo exceso de uso de dispositivos digitales.

*Diseñado para respaldar las funciones de la película lagrimal. ¹JJV datos en archivo 2021. Definición de la Tecnología HydraLuxe® ². JJV Datos en Archivo 2021. Lentes de contacto de la marca ACUVUE® para el ASTIGMATISMO: éxito general de adaptación, posición de orientación, estabilidad rotacional y rendimiento visual

LENTES DE CONTACTO DE USO ÚNICO Y REEMPLAZO DIARIO

Página | 19



HIDROGEL

1-DAY ACUVUE® MOIST WITH LACREON®

Rendimiento probado en el que
puede confiar

PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan conveniencia,
comodidad y libertad de movimiento.

Página | 21



HIDROGEL

1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®

Rendimiento probado en el que
puede confiar mientras mantiene la
visión clara y estable¹

PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan tener una visión
estable con practicidad y comodidad.

¹. JJV datos en archivo 2021. Lentes de contacto ACUVUE® para ASTIGMATISMO - Éxito general en la adaptación, posición de la orientación, estabilidad rotacional y desempeño de la visión.

LENTES DE CONTACTO DE USO ÚNICO Y REEMPLAZO DIARIO

Página | 26



HIDROGEL
**1-DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL WITH
LACREON®**

Visión clara para todas las distancias*¹

PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios con presbicia que buscan una excelente experiencia de visión durante todo el día.

LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | 28



HIDROGEL DE SILICONA
**ACUVUE® OASYS WITH
HYDRACLEAR® PLUS**

Comodidad insuperable**²

PERFIL DEL USUARIO

Para quienes poseen un estilo de vida que exige más, de parte de los lentes de contacto, como trabajar largas horas frente a la computadora, en ambientes secos o con aire acondicionado.

*Comparado con ACUVUE® OASYS con HYDRACLEAR® Plus. ** www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLux®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. 1. JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits. 2. Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLux®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov

LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | 30



HIDROGEL DE SILICONA
**ACUVUE® OASYS FOR
 ASTIGMATISM WITH
 HYDRACLEAR® PLUS**

Comodidad insuperable mientras mantiene la visión clara y estable^{*,1,2}

PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios existentes o nuevos, de lentes de contacto para astigmatismo, que buscan calidad y estabilidad visual en las actividades diarias.

Página | 37



HIDROGEL DE SILICONA
**ACUVUE® OASYS
 MULTIFOCAL WITH
 HYDRACLEAR® PLUS**

Visión clara para todas las distancias^{**3}

PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios presbítas que buscan una visión clara en todas las distancias, de cerca, de lejos y en distancias intermedias.⁴

*www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. **Comparado con el diseño anterior multifocal de JJVC; tecnología optimizada para parámetros de error refractivo y potencia de adición en una multitud de distancias de visión y niveles de luz. 1. Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov 2. JJV Datos en Archivo 2018. Similitudes entre Mucina y Poli(N-Vinil Pirrolidona) (PVP). 3. JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits 4. JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: Lentes de contacto JJVC, características de diseño y beneficios asociados.

LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | 39



HIDROGEL DE SILICONA

ACUVUE® VITA™

Hidratación y comodidad durante todo el mes de uso¹

PERFIL DEL USUARIO

Para pacientes que desean el esquema de reemplazo y asequibilidad de un lente mensual pero quieren evitar la pérdida de comodidad a lo largo del mes²

Página | 41



HIDROGEL DE SILICONA

ACUVUE® VITA™

FOR ASTIGMATISM

Hidratación y comodidad durante todo el mes de uso, manteniendo la visión clara y estable^{1,3}

PERFIL DEL USUARIO

Para pacientes astígmata que desean el esquema de reemplazo y asequibilidad de un lente mensual pero quieren evitar la pérdida de comodidad a lo largo del mes^{1,4,5}

¹. JJV datos en archivo 2017. Definición de la Tecnología HydraMax® ². Nichols J et al. Taller internacional TFOS sobre molestias CL. IOVS 2013;54. ³. JJV datos en archivo 2018. Diseño de lentes de contacto ACUVUE® VITA® para ASTIGMATISMO. ⁴. Datos de archivo JVC 2017, Desempeño subjetivo y resultados clínicos de ACUVUE® VITA™ Brand Contact Lenses with HydraMax™ Technology for ASTIGMATISM ⁵. Datos de archivo JVC 2017, Éxito general de adaptación de las lentes de contacto ACUVUE® para astigmatismo, orientación correcta, certeza rotacional y rendimiento visual.

LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | **46**



HIDROGEL **ACUVUE® 2**

Visión clara con una gran relación
calidad-precio

PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios con miopía o hipermetropía. Ideales
para quienes no se adaptan a lentes de contacto
de hidrogel de silicona.

**COMODIDAD
INSUPERABLE CON
LA PRACTICIDAD DE
LOS DESECHABLES
DIARIOS*,1**



HYDRALUXE™



ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™

🕒 PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan corrección de la visión y ejercen múltiples actividades todos los días.


🕒 BENEFICIOS

- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular²**
- Tecnología HydraLuxe™, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad²**
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad²**
- Protección UV clase 1: **salud ocular³**
- Superficie suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad²**
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente¹

*Diseñado para respaldar las funciones de la película lagrimal. 1.JJV datos en archivo 2021. Definición de la Tecnología HydraLuxe® 2. MEYLER, J. ; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. 3. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a la protección de la radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de los anteojos de sol con bloqueador UV, ya que los lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante.

TECNOLOGÍA

La Tecnología HydraLuxe™ emplea un diseño de lágrima infundido. Una red aumentada de moléculas semejantes a la de la lágrima mimetiza las mucinas para ayudar a mantener la película lagrimal estable.

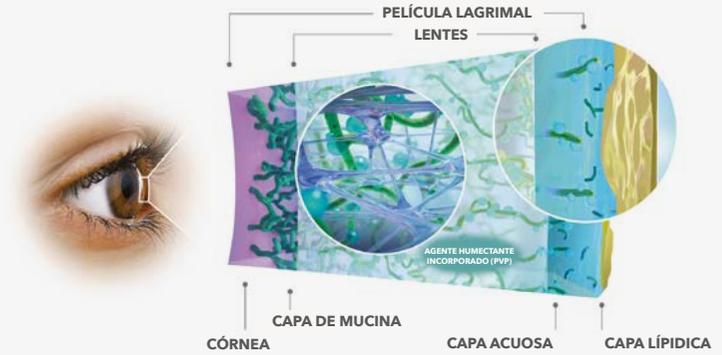

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso único
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Reemplazo diario
PRESENTACIÓN	Caja con 30 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Miopía e hipermetropía

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.5
DIÁMETRO TOTAL mm	14.3
DIOPTRIAS DISPONIBLES	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D +6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A Hidrogel de Silicona	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	Tecnología HydraLuxe™
CONTENIDO DE AGUA	38%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.68
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	121 x 10 ⁻⁹ (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO	50
PROTECCIÓN UV	Clase 1 (99.9% UVB, 96% UVA)	TINTE DE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
ESPESOR CENTRAL mm	0.085 (para -3.00D)	INDICADOR DERECHO - REVÉS	Si, 123

**COMODIDAD
INSUPERABLE CON LA
PRACTICIDAD DE LOS
DESECHABLES DIARIOS,
MANTENIENDO LA
VISIÓN CLARA Y
ESTABLE*^{1,2}**



HYDRALUXE™



ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM

PERFIL DEL USUARIO

Para pacientes astígmatas quienes están expuestos a ambientes desafiantes, incluyendo exceso de uso de dispositivos digitales.

BENEFICIOS

- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular**³
- Tecnología HydraLuxe™, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad**³
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad**³
- Protección UV clase 1: **salud ocular**⁴
- Superficie suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad**³
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente³

*Diseñado para respaldar las funciones de la película lagrimal. **1.**JJV datos en archivo 2021. Definición de la Tecnología HydraLuxe® **2.** JJV Datos en Archivo 2021. Lentes de contacto de la marca ACUVUE® para el ASTIGMATISMO: éxito general de adaptación, posición de orientación, estabilidad rotacional y rendimiento visual. **3.** MEYLER, J.; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. **4.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a la protección de la radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de los anteojos de sol con bloqueador UV, ya que los lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante.

TECNOLOGÍA

El Diseño de Estabilización por Parpadeo. (DEP) usa el movimiento natural del parpadeo para estabilizar los lentes, brindando una adaptación más rápida, mayor comodidad y calidad de visión.¹

Para mayor información sobre la tecnología DEP, ver las páginas 35 y 36.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso único
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Reemplazo diario
PRESENTACIÓN	Caja con 30 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Astigmatismo

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.5
DIÁMETRO TOTAL mm	14.3
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	<p>Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro -2.25 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A (Hidrogel de Silicona)		
CONTENIDO DE AGUA	38%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.66 (96 psi)
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	129 x 10 ⁻⁹ (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO	45
PROTECCIÓN UV	Clase 1 (99.9% UVB, 96,7% UVA)	TINTE DE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
ESPESOR CENTRAL mm	0.080 (para -3.00D)	MARCA DE ORIENTACIÓN	12h y 6h
AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	Tecnología HydraLuxe™	SUAVIDAD <i>Coefficiente de fricción</i>	0.018

¹. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO NETO, A.A. La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA. GBR. 2009; 66 (33): 52-7.

ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM

POTENCIAS NEGATIVAS CLAVES					
POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		Plano a -6.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
OBLICUO	30°	•	•	•	
	40°	•	•	•	
	50°	•	•	•	
	60°	•	•	•	
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
	110°	•	•	•	•
OBLICUO	120°	•	•	•	
	130°	•	•	•	
	140°	•	•	•	
	150°	•	•	•	•
CON LA REGLA	160°	•	•	•	•
	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

POTENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS ALTAS					
POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		-6,50 a -9,00 en pasos de 0,50D +0.25 a +4.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	
OBLICUO	30°				
	40°				
	50°				
	60°				
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
	110°	•	•	•	•
OBLICUO	120°				
	130°				
	140°				
	150°				
CON LA REGLA	160°	•	•	•	•
	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

● PARÁMETROS ACTUALES

INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS								
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75
Plano	Plano									
-0,25	-0,25									
-0,50	-0,50									
-0,75	-0,75									
-1,00	-1,00									
-1,25	-1,25									
-1,50	-1,50									
-1,75	-1,75									
-2,00	-2,00									
-2,25	-2,25									
-2,50	-2,50									
-2,75	-2,75									
-3,00	-3,00									
-3,25	-3,25									
-3,50	-3,50									
-3,75	-3,75									
-4,00	-4,00									
-4,25	-4,00		cil		cil		cil		cil	
-4,50	-4,25		-0,75		-1,25		-1,75		-2,25	
-4,75	-4,50									
-5,00	-4,75									
-5,25	-5,00									
-5,50	-5,00									
-5,75	-5,25									
-6,00	-5,50									
-6,25	-5,75									
-6,50	-6,00									
-6,75	-6,00									
-7,00	-6,50									
-7,25	-6,50									
-7,50	-6,50									
-7,75	-7,00									
-8,00	-7,00									
-8,25	-7,50									
-8,50	-7,50									
-8,75	-8,00									
-9,00	-8,00									
-9,50	-8,50									
-10,00	-9,00		PRUEBE UN LENTE ESFÉRICO							



ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM DIOPTRIAS CILÍNDRICAS

Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25

INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRÍAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM	DIOPTRÍAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS					
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00
+4,00	+4,25						
+3,75	+4,00						
+3,50	+3,50						
+3,25	+3,25						
+3,00	+3,00						
+2,75	+2,75		cil	cil		cil	
+2,50	+2,50		-0,75	-1,25		-1,75	
+2,25	+2,25						
+2,00	+2,00						
+1,75	+1,75						
+1,50	+1,50						
+1,25	+1,25						
+1,00	+1,00						
+0,75	+0,75						
+0,50	+0,50						
+0,25	+0,25						

ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM DIOPTRÍAS CILÍNDRICAS
Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75



**RENDIMIENTO
PROBADO EN EL QUE
PUEDE CONFIAR**



LACREON®



1-DAY ACUVUE® MOIST WITH LACREON®

● PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan conveniencia, comodidad y libertad de movimiento.¹

● BENEFICIOS


- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular**¹
- Tecnología Lacreon®, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad**¹
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad**¹
- Protección UV clase 2: **salud ocular**²
- Superficie suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad**¹
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente¹

1. MEYLER, J. ; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. 2. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado.

TECNOLOGÍA

La tecnología LACREON® incorpora al material del lente un agente humectante que retiene la humedad y reproduce la lubricación natural de la película lagrimal.

Lentes más suaves e hidratados que ofrecen comodidad prolongada a lo largo del día.¹

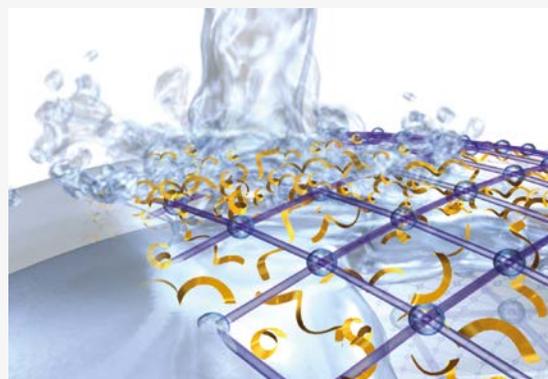

Contenido de agua²



Agente humectante²



Matriz del material del lente²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso único
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Reemplazo diario
PRESENTACIÓN	Caja con 30 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Miopía e hipermetropía

PARÁMETROS


CURVA BASE mm	8.5 (9.0 a pedido)
DIÁMETRO TOTAL mm	14.2
DIOPTRIAS DISPONIBLES	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Etafilcon A Hidrogel	AGENTE HUMECTANTE	Interior del Lente	Tecnología LACREON®
CONTENIDO DE AGUA	58%	FLEXIBILIDAD	Módulo MPa	0.26
TRANSMISIBILIDAD	$25,5 \times 10^{-9}$	ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO		84
PROTECCIÓN UV	Clase 2 (97% UVB, 82% UVA)	TINTE DE VISIBILIDAD		Si (azul claro)
ESPESOR CENTRAL mm	0.084 (para -3.00D)	INDICADOR DERECHO - REVÉS		Si, 123
FLUJO DE OXÍGENO	88%	SUAVIDAD	Coefficiente de fricción	0.02

1. VEYS, J; MEYLER, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician; 2006; 6046 (231): 34-6. 2. Conclusión elaborada por Johnson & Johnson Vision Care, basada en el modo de uso según la guía de instrucciones para el usuario. 2. Imágenes sólo para fines ilustrativos.

**RENDIMIENTO
PROBADO EN EL QUE
PUEDE CONFIAR
MIENTRAS MANTIENE
LA VISIÓN CLARA Y
ESTABLE¹**

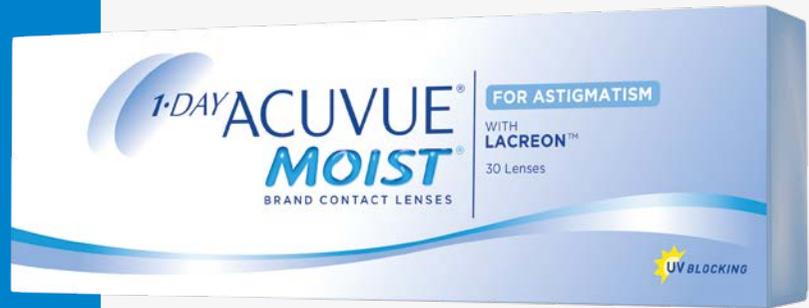

LACREON®



1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®

● PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan tener una visión estable con practicidad y comodidad.

● BENEFICIOS

- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular²**
- Tecnología Lacreon®, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad²**
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad²**
- Protección UV clase 2: **salud ocular³**
- Superficie del lente suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad²**
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente²

1. JJV datos en archivo 2021. Lentes de contacto ACUVUE® para ASTIGMATISMO - Éxito general en la adaptación, posición de la orientación, estabilidad rotacional y desempeño de la visión. 2. MEYLER, J.; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. 3. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado.

TECNOLOGÍA

El Diseño de Estabilización por Parpadeo. (DEP) usa el movimiento natural del parpadeo para estabilizar los lentes, brindando una adaptación más rápida, mayor comodidad y calidad de visión.¹

Para mayor información sobre la tecnología DEP, ver las páginas 24 y 25.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso único
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Reemplazo diario
PRESENTACIÓN	Caja con 30 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Astigmatismo

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.5
DIÁMETRO TOTAL mm	14.5
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	<p>Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro -2.25 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Etafilicon A Hidrogel	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	Tecnología LACREON®
CONTENIDO DE AGUA	58%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.27
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	23.8 x 10 ⁻⁹	ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO	84
PROTECCIÓN UV	Clase 2 (97% UVB, 82% UVA)	TINTE DE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
ESPESOR CENTRAL mm	0.09 (para -3.00D)	MARCA DE ORIENTACIÓN	12h y 6h
FLUJO DE OXÍGENO	87%	SUAVIDAD <i>Coefficiente de fricción</i>	0.022

1. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO NETO, A.A. La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA. GBR. 2009; 66 (33): 52-7.

1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®

POTENCIAS NEGATIVAS CLAVES					
POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		Plano a -6.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
OBLICUO	30°	•	•	•	
	40°	•	•	•	
	50°	•	•	•	
	60°	•	•	•	
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
OBLICUO	110°	•	•	•	•
	120°	•	•	•	
	130°	•	•	•	
	140°	•	•	•	
CON LA REGLA	150°	•	•	•	
	160°	•	•	•	•
	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

POTENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS ALTAS					
POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		-6,50 a -9,00 en pasos de 0,50D +0.25 a +4.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	
OBLICUO	30°				
	40°				
	50°				
	60°				
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
OBLICUO	110°	•	•	•	•
	120°				
	130°				
	140°				
CON LA REGLA	150°				
	160°	•	•	•	•
	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

● PARÁMETROS ACTUALES

INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS									
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	
Plano	Plano										
-0,25	-0,25										
-0,50	-0,50										
-0,75	-0,75										
-1,00	-1,00										
-1,25	-1,25										
-1,50	-1,50										
-1,75	-1,75										
-2,00	-2,00										
-2,25	-2,25										
-2,50	-2,50										
-2,75	-2,75										
-3,00	-3,00										
-3,25	-3,25										
-3,50	-3,50										
-3,75	-3,75										
-4,00	-4,00										
-4,25	-4,00		cil		cil		cil		cil		
-4,50	-4,25		-0,75		-1,25		-1,75		-2,25		
-4,75	-4,50										
-5,00	-4,75										
-5,25	-5,00										
-5,50	-5,00										
-5,75	-5,25										
-6,00	-5,50										
-6,25	-5,75										
-6,50	-6,00										
-6,75	-6,00										
-7,00	-6,50										
-7,25	-6,50										
-7,50	-6,50										
-7,75	-7,00										
-8,00	-7,00										
-8,25	-7,50										
-8,50	-7,50										
-8,75	-8,00										
-9,00	-8,00										
-9,50	-8,50										
-10,00	-9,00		PRUEBE UN LENTE ESFÉRICO								



1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON® DIOPTRIAS CILÍNDRICAS

Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25

INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS					
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00
+4,00	+4,25						
+3,75	+4,00						
+3,50	+3,50						
+3,25	+3,25						
+3,00	+3,00						
+2,75	+2,75		cil	cil		cil	
+2,50	+2,50		-0,75	-1,25		-1,75	
+2,25	+2,25						
+2,00	+2,00						
+1,75	+1,75						
+1,50	+1,50						
+1,25	+1,25						
+1,00	+1,00						
+0,75	+0,75						
+0,50	+0,50						
+0,25	+0,25						



1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON® DIOPTRIAS CILÍNDRICAS

Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75

**VISION CLARA
PARA TODAS LAS
DISTANCIAS*,1**



1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL WITH LACREON®

🕒 PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios con presbicia que buscan una excelente experiencia de visión durante todo el día


🕒 BENEFICIOS

- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular**²
- Tecnología Lacreon®, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad**²
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad**²
- Protección UV clase 2: **salud ocular**³
- Superficie del lente suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad**²
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente²
- Diseño EYE-INSPIRED™: un diseño centro-cerca esférico único para una adaptación precisa para el ojo presbita.

*Comparado con el diseño anterior multifocal de JJVC; tecnología optimizada para parámetros de error refractivo y potencia de adición en una multitud de distancias de visión y niveles de luz. **1.** JJV Datos de archivo 2020, ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits. **2.** MEYLER, J.; VEYS, J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician. 2006; 6046(231): 34-6. **3.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a brindar protección contra la dañina transmisión de radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de anteojos de sol con bloqueador UV, ya que los lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante.

TECNOLOGÍA

Tecnología **INTUISIGHT™** - Optimización de la pupila para el ojo presbita. EL LENTE MULTIFOCAL optimiza el diseño óptico de acuerdo a la variación natural del tamaño de la pupila, la edad y la potencia de refracción, con el fin de brindar una experiencia superior para más pacientes.

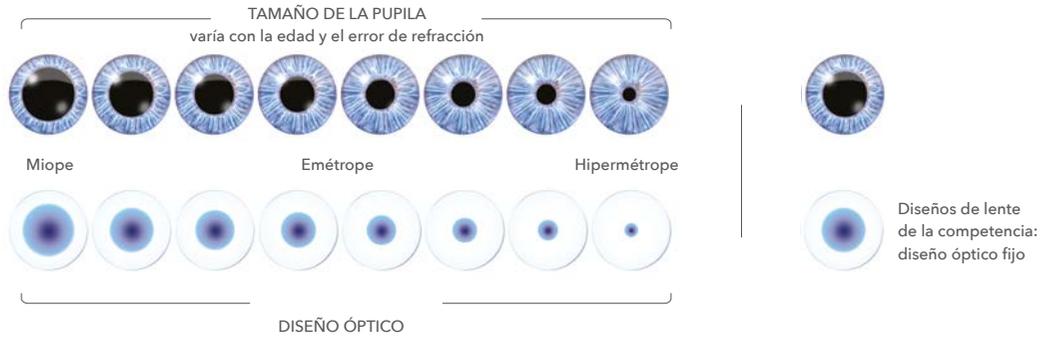

Sólo para fines ilustrativos. El área de la pupila puede variar por ~20% con una iluminación particular.*

* En toda la gama de potencias de +4.00D a -6.00D.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso único
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Reemplazo diario
PRESENTACIÓN	Caja con 30 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Presbicia

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.4
DIÁMETRO TOTAL mm	14.3
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	-9.00 a +6.00 (en pasos de 0.25 D)
ADICCIÓN	LOW +0.75 a +1.25 MID +1.50 a +1.75 HIGH +2.00 a +2.50

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Etafilcon A Hidrogel	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	LACREON®
CONTENIDO DE AGUA	58%	INDICADOR DE DERECHO -REVÉS	Si
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	25.5 x 10 ⁻⁹	ESPESOR CENTRAL mm	0.07 (para -3.00D)
PROTECCIÓN UV	Clase 2 ^S (97% UVB, 82% UVA)	TIENE VISIBILIDAD	Si

S. Debe transmitir menos de 50% (<50%) de UVA y 5% (<5%) UVB.

**COMODIDAD
INSUPERABLE*,1**



ACUVUE® OASYS WITH HYDRACLEAR® PLUS

PERFIL DEL USUARIO

Para quienes poseen un estilo de vida que exige más de parte de los lentes de contacto, como trabajar largas horas frente a la computadora, en ambientes secos o con aire acondicionado.²


BENEFICIOS

- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**^{3,4}
- Tecnología Hydraclear® plus, que mantiene el lente hidratado durante todo el tiempo de uso, incluso en ambientes desafiantes: **comodidad**^{3,4}
- Alta protección uv en lentes de contacto: **salud ocular**⁵
- Flexibilidad equilibrada que permite una adecuada adaptación a la superficie ocular: **comodidad y facilidad de manipulación**^{3,4}
- Bajo coeficiente de fricción, cercano al de la córnea humana, lo que implica menor irritación del párpado superior en cada parpadeo y sensación de suavidad: **comodidad**^{4,6}

* www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. **1.** Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov **2.** Joven, G.; Riley, C.; Chalmers, R.; Hunt, C. Confort de Lentes de contacto con Hydrogel en entornos desafiantes y el efecto de reacondicionamiento con lentes de hidrogel de silicona. Optometría y Ciencias de la Visión, vol. 84; N° 4, pp 302-308. **3.** OSBORN, K & VEYS, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la sequedad relacionada con lentes de contacto. Parte 1 - Propiedades del material. Optician, 2005; 6004 (229): 39-41. **4.** Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de superficie ocular. Síntomas, signos y horas de uso incómodas en usuarios de lentes de contacto: el efecto de reajustar con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). Eye & Contact Lens, 2006; 32 (6): 281-286. **5.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a brindar protección contra la dañina transmisión de radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de anteojos de sol con bloqueador UV, y que las lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante. **6.** Francés, K.; Jones, L. Una década con hidrogeles de silicona: Parte 1. Optometría de hoy. 2008; 48: 42-6.

TECNOLOGÍA

La tecnología HYDRACLEAR® PLUS incorpora un alto volumen de agente humectante a la estructura interna del material del lente, manteniéndolo más hidratado por más tiempo. Al estar incorporado al material del lente, el efecto del agente humectante no se desgasta a lo largo del tiempo de uso de los lentes, garantizando una comodidad superior, incluso en ambientes desafiantes para el uso de lentes de contacto, como largas horas trabajando frente a la computadora, en ambientes secos o con aire acondicionado.^{1,2,3}

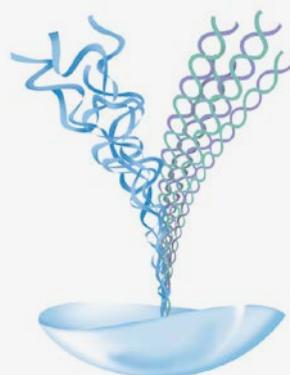

Cadena larga de molécula de agua



Exclusivo agente humectante interno



Exclusivo polímero de silicón capaz de retener agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso diario o extendido
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
PRESENTACIÓN	Caja con 6 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Miopía e hipermetropía

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.4 (8.8 a pedido)
DIÁMETRO TOTAL mm	14.0
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D +6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A Hidrogel de Silicona	AGENTE HUMECTANTE	Interior del Lente	HIDRACLEAR® PLUS
CONTENIDO DE AGUA	38%	FLEXIBILIDAD	Módulo MPa	0.68
TRANSMISIBILIDAD	147 x 10 ⁻⁹	TIENE VISIBILIDAD		Si (azul claro)
PROTECCIÓN UV	Clase 1 (99.9% UVB, 96.1% UVA)	INDICADOR DERECHO - REVÉS		Si, 123
ESPESOR CENTRAL mm	0.07 (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO		45
FLUJO DE OXÍGENO	98%	SUAVIDAD	Coefficiente de fricción	0.01

1. Joven, G.; Riley, C.; Chalmers, R.; Hunt, C. Hydrogel Lens Comfort en entornos desafiantes y el efecto de reacondicionamiento con lentes de hidrogel de silicón. *Optometría y Ciencias de la Visión*, vol. 84; N° 4, pp 302-308. 2. Osborn, K.; Veys, J. Una nueva lente de hidrogel de silicón para la sequedad relacionada con lentes de contacto, parte 1, propiedades del material. *Optician*, 2005; 229 (6004): 39-41. 3. Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de superficie ocular. Síntomas, signos y horas de uso incómodas en usuarios de lentes de contacto: el efecto de reajustar con lentes de hidrogel de silicón de uso diario (Senofilcon A). *Eye & Contact Lens*, 2006; 32 (6): 281-286. *Lens*, 2006; 32(6):281-286.

**COMODIDAD
INSUPERABLE
MIENTRAS
MANTIENE LA
VISIÓN CLARA
Y ESTABLE*^{1,2}**



ACUVUE® OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR® PLUS

PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios existentes o nuevos de lentes de contacto para astigmatismo, que buscan calidad de visión con comodidad.^{3,4}


BENEFICIOS

- Calidad visual y estabilidad constantes en las actividades dinámicas diarias del usuario^{3,4}
- Alta protección uv en lentes de contacto: **salud ocular**⁵
- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**^{6,7,8}
- Tecnología Hydraclear® plus, que mantiene el lente hidratado durante todo el tiempo de uso: **comodidad**^{6,7}
- Bajo coeficiente de fricción, cercano al de la córnea humana, lo que implica menor irritación del párpado superior en cada parpadeo y sensación de suavidad: **comodidad**^{7,9}
- Flexibilidad equilibrada que permite una adecuada adaptación a la superficie ocular: **comodidad y facilidad de manipulación**^{6,7}

* www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. **1.** Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov **2. JJV Datos en Archivo 2018. Similitudes entre Mucina y Poli(N-Vinil Pirrolidona) (PVP).** **3.** ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO NETO, A.A., La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEARBM. 2009; 66 (33): 52-7. **4.** McIlraith, R.; Young, G.; Caza, C. Orientación de la lente tórica y agudeza visual en condiciones no estándar. Lente de contacto anterior del ojo, 2010; 33: 23-6. **5.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a la protección de la radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de los anteojos de sol con bloqueador UV, ya que los lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante. **6.** OSBORN, K & VEYS, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la sequedad relacionada con lentes de contacto. Parte 1 - Propiedades del material. Optician, 2005; 6004 (229): 39-41. **7.** Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalence of ocular surface symptoms, signs, and uncomfortable hours of wear in contact lens wearers: The effect of refitting with daily-wear silicone hydrogel lenses (Senofilcon A). Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de síntomas en la superficie ocular, signos y horas de uso incómodas en los usuarios de lentes de contacto: el efecto de la reparación con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). Eye & Contact Lens, 2006; 32 (6): 281-286. **8.** Comparado con 100% de oxígeno para los ojos sin lentes de contacto. **9.** Francés, K.; Jones, L. Una década con hidrogeles de silicona: Parte 1. Optometry Today, 2008; 48: 42-6.

TECNOLOGÍA

- El Diseño de Estabilización por Parpadeo (DEP) utiliza la fuerza natural del parpadeo para mantener el lente en la posición correcta.
- Son cuatro zonas de estabilización que interactúan con los párpados durante el parpadeo, estabilizan el lente de contacto y proporcionan calidad y estabilidad visual.
- Espesor mínimo de los lentes bajo los párpados.^{1,2}

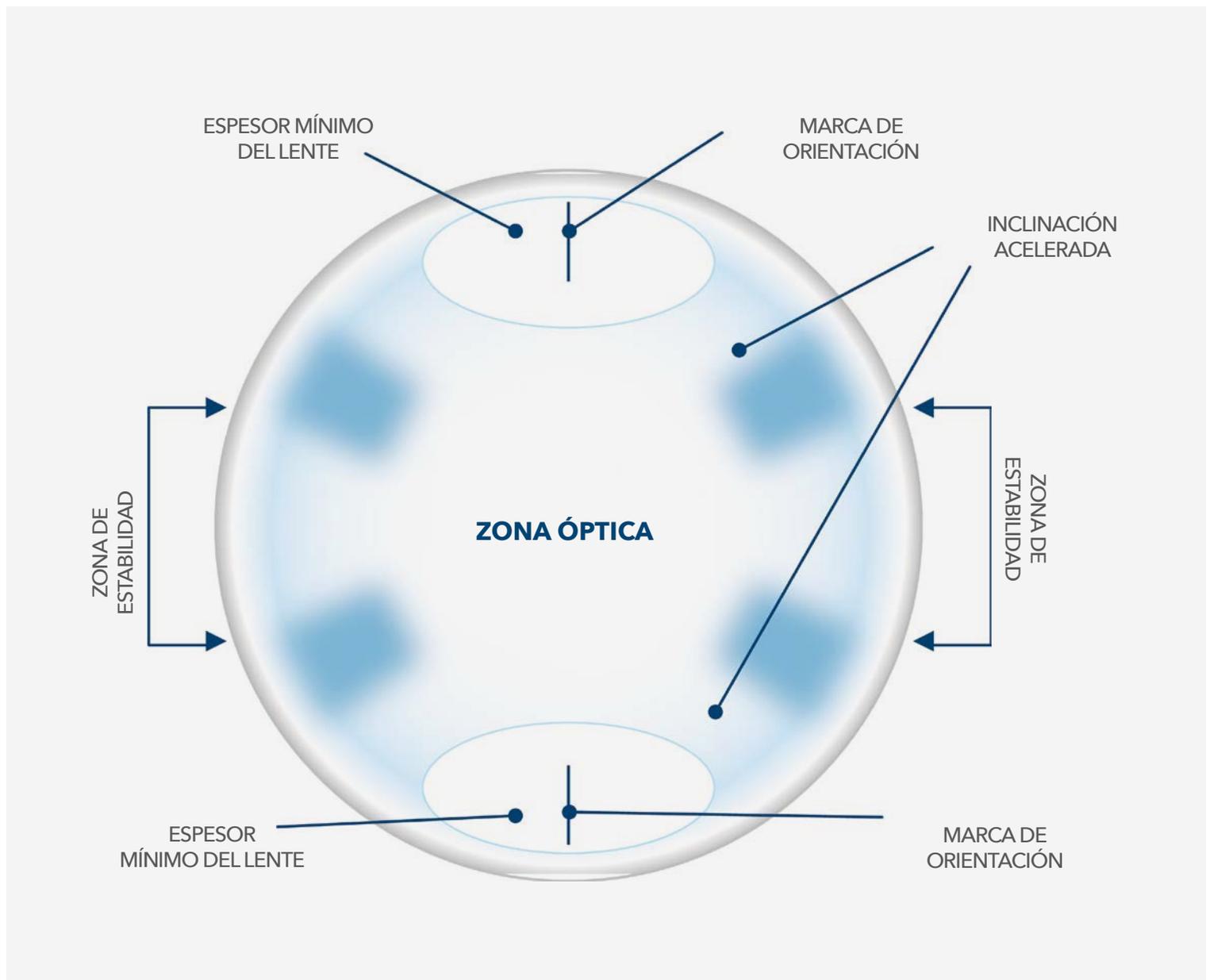


1. ARIETA, C.E. ; ALVES, M.R. ; LOBÁO NETO, A.A., La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA.RBM. 2009; 66 (33): 52-7. 2. McIlraith, R.; Young, G. ; Caza, C. Orientación de la lente tórica y agudeza visual en condiciones no estándar. Lente de contacto anterior del ojo, 2010; 33: 23-6.

TECNOLOGÍA



Cuatro zonas activas de estabilidad que interactúan positivamente con el parpadeo para mantener el lente en la posición correcta.^{1,2}

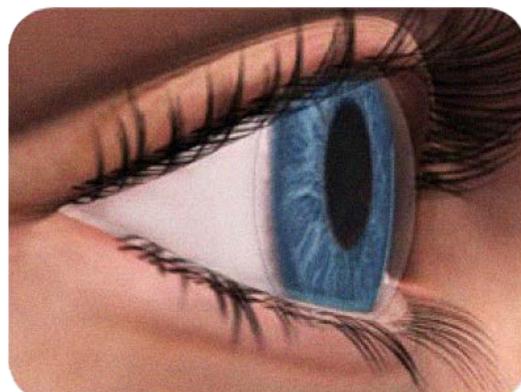

El lente es más fino bajo los párpados, y así mejora la sensación de comodidad y ofrece mayor estabilidad, independientemente del movimiento de los ojos.^{1,2}



El lente se mantiene estable independiente de la fuerza de gravedad y de los movimientos de los ojos en actividades dinámicas diarias, como posicionar la cabeza en 90°.^{1,2}

1. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÁO NETO, A.A., La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA.RBM. 2009; 66 (33): 52-7. 2. McIlraith, R.; Young, G.; Caza, C. Orientación de la lente tórica y agudeza visual en condiciones no estándar. Lente de contacto anterior del ojo, 2010; 33: 23-6.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso diario o extendido
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
PRESENTACIÓN	Caja con 6 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Astigmatismo

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.6
DIÁMETRO TOTAL mm	14.5
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	<p>Plano a -6,00D (pasos de 0,25D) Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75 Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°) Cilindro: -2,25, -2,75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6,50D a -9,00D (pasos de 0,50D) Cilindro: -0,75, -1,25 Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°) Cilindro: -1,75, -2,25, -2,75 Ejes: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0,25D a +6,00D (pasos de 0,25D) Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A Hidrogel de Silicona	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	HIDRACLEAR® PLUS
CONTENIDO DE AGUA	38%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.69
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	129 x 10 ⁻⁹	TIENE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
PROTECCIÓN UV	Clase 1 (>99.9% UVB, >96.1% UVA)	MARCA DE ORIENTACIÓN	12h y 6h
ESPESOR CENTRAL mm	0.08 (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO	45
FLUJO DE OXÍGENO	98%	SUAVIDAD <i>Coeficiente de fricción</i>	0.01

ACUVUE® OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HIDRACLEAR® PLUS

Los lentes de contacto ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS ahora pueden adaptar 99% de los pacientes con dioptrías esféricas o cilíndricas^{1,2}

NUEVO

PARÁMETROS

DIOPTRIAS ESFÉRICAS	MIOPIA Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D)					MIOPIA ELEVADA -6.50D A -9.00D (en pasos de 0.50D)					HIPERMETROPIA +0.25D A +6.00D (en pasos de 0.25D)				
	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75
EJES/ CILINDROS															
10°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
20°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30°	●	●	●			●	●								
40°	●	●	●			●	●								
50°	●	●	●			●	●								
60°	●	●	●			●	●								
70°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
80°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
90°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
100°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
110°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
120°	●	●	●			●	●								
130°	●	●	●			●	●								
140°	●	●	●			●	●								
150°	●	●	●			●	●								
160°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
170°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

1. JJVC, datos en archivo 2014. ACUVUE OASYS® cubren hasta un 98,5% de las recetas esféricas y cilíndricas. ACUVUE OASYS®, HYDRACLEAR® e INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ son marcas registradas de Johnson & Johnson Medical Ltd. © Johnson & Johnson Medical Ltd. 2014. 2. Holden, B.A (1975) Principios y práctica de la corrección del astigmatismo con lentes de contacto blandas. The Australian Journal of Opt., 58: 279 299.

● PARÁMETROS ACTUALES

**VISIÓN CLARA
PARA TODAS LAS
DISTANCIAS*¹**



ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL CON DISEÑO DE PUPILA OPTIMIZADA

PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios prébitas existentes o nuevos de lentes de contacto, que buscan una visión clara en todas las distancias, de cerca, de lejos y en distancias intermedias.²


BENEFICIOS

- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**^{3,4,7}
- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**^{3,4,7}
- Alta protección uv en lentes de contacto: **salud ocular**⁵
- Bajo coeficiente de fricción, cercano al de la córnea humana, lo que implica menor irritación del párpado superior en cada parpadeo y sensación de suavidad: **comodidad**^{4,6}
- Flexibilidad equilibrada que permite una adecuada adaptación a la superficie ocular: **comodidad y facilidad de manipulación**^{3,4}
- Diseño EYE-INSPIRED™: un diseño centro-cerca esférico único para una adaptación precisa para el ojo présbita.

*Comparado con el diseño anterior multifocal de JJVC; tecnología optimizada para parámetros de error refractivo y potencia de adición en una multitud de distancias de visión y niveles de luz. **1.** JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits **2.** JJV Data on File 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits. **3.** OSBORN, K & VEYS, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la sequedad relacionada con lentes de contacto. Parte 1 - Propiedades del material. Optician, 2005; 6004 (229): 39-41. **4.** Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de superficie ocular. Síntomas, signos y horas de uso incómodas en usuarios de lentes de contacto: el efecto de reajustar con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). Eye & Contact Lens, 2006; 32 (6): 281-286. **5.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a brindar protección contra la dañina transmisión de radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de anteojos de sol con bloqueador UV, y que las lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante. **6.** Francés, K.; Jones, L. Una década con hidrogeles de silicona: Parte 1. Optometría de hoy, 2008; 48: 42-6. **7.** Comparado con 100% de oxígeno para los ojos sin lentes de contacto.

TECNOLOGÍA

Con diseño de pupila optimizada para el ojo presbita EL LENTE MULTIFOCAL optimiza el diseño óptico de acuerdo a la variación natural del tamaño de la pupila, la edad y la potencia de refracción, con el fin de brindar una experiencia superior para más pacientes.*¹

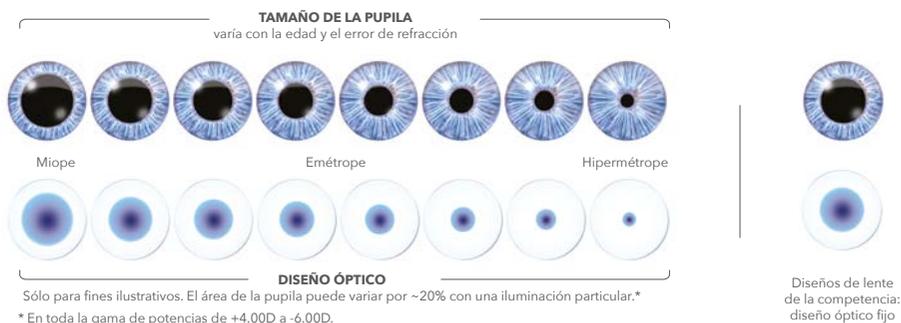

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Diario o extendido
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
PRESENTACIÓN	Caja con 6 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Presbicia

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.4
DIÁMETRO TOTAL mm	14.3
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	-9.00 a +6.00 (en pasos de 0.25 D)
ADICCIÓN	LOW +0.75 a +1.25 MID +1.50 a +1.75 HIGH +2.00 a +2.50

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	Hydraclear® Plus
CONTENIDO DE AGUA	38%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.69
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	147 x 10 ⁻⁹ (-3.00D)	TIENE VISIBILIDAD	Si
PROTECCIÓN UV	Clase 1 (99.9% UVB, 96.1% UVA)	SUAVIDAD <i>Coefficiente de fricción</i>	< 0.018
ESPESOR CENTRAL mm	0.07 (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO	45
FLUJO DE OXÍGENO	98% (ojo abierto), 96% (ojo cerrado)	INDICADOR DE DERECHO -REVÉS	Si

*Comparado con el diseño anterior multifocal de JJVC; tecnología optimizada para parámetros de error refractivo y potencia de adición en una multitud de distancias de visión y niveles de luz. 1. JJV datos en archivo 2021. TECNOLOGÍA DE DISEÑO DE PUPILA OPTIMIZADA de ACUVUE®: Lentes de contacto de JJVC, características del diseño y beneficios asociados.

**HIDRATACIÓN
Y COMODIDAD
DURANTE TODO
EL MES DE USO²**



ACUVUE® VITA™

● PERFIL DEL USUARIO

Para pacientes que desean el esquema de reemplazo y asequibilidad de un lente mensual, pero quieren evitar la pérdida de comodidad a lo largo del mes¹

● BENEFICIOS


- Maximizan y mantienen la hidratación en todo el lente, mientras que brinda comodidad y visión superiores del día 1 al día 30.¹
- Hasta 21 % mayor comodidad todo el mes que otras marcas líderes de reemplazo mensual.^{*2}
- La familia de lentes ACUVUE® VITA® tiene visión superior durante todo el mes comparada con otras marcas líderes de reemplazo mensual.^{*2,3}

*Lentes de contacto de reemplazo mensual líderes: Air Optix® Aqua, Biofinity® y Ultra® superior "calidad de visión general" basado en un análisis predeterminado de todas las respuestas de los pacientes en una escala de 5 puntos. Las calificaciones reflejan las dos principales respuestas ("excelente/muy bueno") usadas en el análisis. **1.** JJV datos en archivo 2017. Definición de la Tecnología HydraMax® **2.** JJV datos en archivo 2016. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=533 usuarios de LCB blandos de hidrogel de silicona en EE.UU. **3.** JJV datos en archivo 2017. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=226 usuarios de LCB tóricos en EE.UU.

TECNOLOGÍA

La tecnología HydraMax™ es un lente de hidrogel de silicona sin recubrimiento de superficie cuya fórmula se ha calculado para ayudar a maximizar y mantener la hidratación.

EYE-INSPIRED™ DESIGN

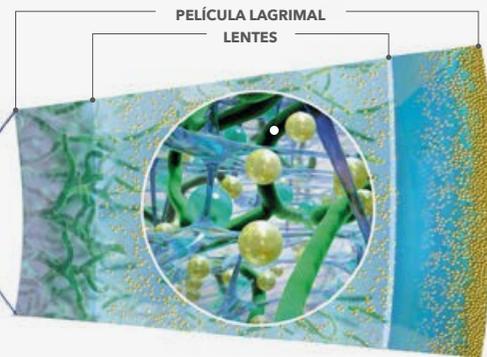

LA HIDRATACIÓN SE MAXIMIZA
incorporando la máxima cantidad de agente hidratante en esta lente.

LA HIDRATACIÓN SE MANTIENE
con una distribución y densidad óptima de lípidos beneficiosos en el interior de la lente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Diario
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Mensual
PRESENTACIÓN	Caja con 6 unidades
ERROR DE REFRACCIÓN	Miopía e hipermetropía

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.4
DIÁMETRO TOTAL mm	14.0
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D + 0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D + 6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon C	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	HydraMax™
CONTENIDO DE AGUA	41%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.77
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	147 x 10 ⁻⁹ para una lente de -3.00D	TIENE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
PROTECCIÓN UV*	Clase 1 (99.8% UVB, 93.4% UVA)	INDICADOR DERECHO - REVÉS	Si, 123
ESPESOR CENTRAL mm	0.07 (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO	55
FLUJO DE OXÍGENO	98% (ojo abierto)	SUAVIDAD	0.01

*Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV de Clase 1 o de Clase 2 para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones de UV medidas en una lente de -1.00D. Datos de archivo JJVC 2012.

**HIDRATACIÓN
Y COMODIDAD
DURANTE TODO
EL MES DE USO,
MANTENIENDO
LA VISIÓN CLARA
Y ESTABLE^{1,2}**



ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM

🕒 PERFIL DEL USUARIO

Usuario actual de lentes de contacto de reemplazo mensual que tiene astigmatismo y que busca un lente que brinde una visión clara y estable 1 y una comodidad superior todo el mes^{1,2}

🕒 BENEFICIOS

- Visión clara, cómoda y estable todo el día con el Diseño de ESTABILIZACIÓN POR PARPADEO de ACUVUE®.³
- Maximizan y mantienen la hidratación en todo el lente para una comodidad y visión excepcionales^{1,4}
- Brindan comodidad excepcional y confiable todo el mes⁵

1. JJV datos en archivo 2017. Definición de la Tecnología HydraMax® 2. JJV datos en archivo 2018. Diseño de lentes de contacto ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO. 3. JJV datos en archivo 2021. Lentes de contacto ACUVUE® para ASTIGMATISMO - Éxito general en la adaptación, posición de la orientación, estabilidad rotacional y desempeño de la visión. 4. JJV datos en archivo 2016. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=533 usuarios de LCB blandos de hidrogel de silicona en EE.UU. 5. JJV datos en archivo 2017. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=108 usuarios de LCB tóricos en EE.UU.

TECNOLOGÍA

2 diseños innovadores en comodidad y visión - en un lente mensual

HydraMax™ Technology¹

Es una nueva fórmula de hidrogel de silicona sin recubrimiento de superficie que se ha calculado para ayudar a maximizar y mantener la hidratación en el lente para una comodidad excepcional y de confianza durante todo el mes²



Diseño EYELID STABILISED³

Este diseño se adapta de forma natural al parpadeo de los ojos, ayudando a mantener la lente en la posición correcta³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Diario
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Mensual
PRESENTACIÓN	Caja con 6 unidades
ERROR DE REFRACCIÓN	Miopía e hipermetropía

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.6
DIÁMETRO TOTAL mm	14.5
DIOPTRÍAS DISPONIBLES	<p>Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75, Ejes: 10° a 180° (en incrementos de 10°) Cilindros: -2,25 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon C	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	HydraMax™
CONTENIDO DE AGUA	41%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.77
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	147 x 10 ⁻⁹ para una lente de -3.00D	TIENE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
PROTECCIÓN UV*	Clase 1 (99.8% UVB, 93.4% UVA)	MARCA DE ORIENTACIÓN	12h y 6h
ESPESOR CENTRAL mm	0.07 (para -3.00D)	ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO	55
FLUJO DE OXÍGENO	98% (ojo abierto)	SUAVIDAD	0.01

*Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV de Clase 1 o de Clase 2 para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Los lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones de UV medidas en un lente de -1.00D. Datos de archivo JJVC 2012. **1.** Datos de archivo JJVC 2017, Desempeño subjetivo y resultados clínicos de ACUVUE® VITA™ Brand Contact Lenses with HydraMax™ Technology for ASTIGMATISM; **2.** Datos de archivo JJVC 2016, HydraMax™ Technology; **3.** Datos de archivo JJVC 2017, Éxito general de adaptación de las lentes de contacto ACUVUE® para astigmatismo, orientación correcta, estabilización rotacional y rendimiento visual.

ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM

POTENCIAS NEGATIVAS CLAVES					
POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		Plano a -6.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
OBLICUO	30°	•	•	•	
	40°	•	•	•	
	50°	•	•	•	
	60°	•	•	•	
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
	110°	•	•	•	•
OBLICUO	120°	•	•	•	
	130°	•	•	•	
	140°	•	•	•	
	150°	•	•	•	
CON LA REGLA	160°	•	•	•	•
	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

POTENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS ALTAS					
POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		-6,50 a -9,00 en pasos de 0,50D +0.25 a +4.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	
OBLICUO	30°				
	40°				
	50°				
	60°				
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
	110°	•	•	•	•
OBLICUO	120°				
	130°				
	140°				
	150°				
CON LA REGLA	160°	•	•	•	•
	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

● PARÁMETROS ACTUALES

INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS								
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75
Plano	Plano									
-0,25	-0,25									
-0,50	-0,50									
-0,75	-0,75									
-1,00	-1,00									
-1,25	-1,25									
-1,50	-1,50									
-1,75	-1,75									
-2,00	-2,00									
-2,25	-2,25									
-2,50	-2,50									
-2,75	-2,75									
-3,00	-3,00									
-3,25	-3,25									
-3,50	-3,50									
-3,75	-3,75									
-4,00	-4,00									
-4,25	-4,00		cil		cil		cil		cil	
-4,50	-4,25		-0,75		-1,25		-1,75		-2,25	
-4,75	-4,50									
-5,00	-4,75									
-5,25	-5,00									
-5,50	-5,00									
-5,75	-5,25									
-6,00	-5,50									
-6,25	-5,75									
-6,50	-6,00									
-6,75	-6,00									
-7,00	-6,50									
-7,25	-6,50									
-7,50	-6,50									
-7,75	-7,00									
-8,00	-7,00									
-8,25	-7,50									
-8,50	-7,50									
-8,75	-8,00									
-9,00	-8,00									
-9,50	-8,50									
-10,00	-9,00		PRUEBE UN LENTE ESFÉRICO							

ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM DIOPTRIAS CILÍNDRICAS

Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25



INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS					
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00
+4,00	+4,25						
+3,75	+4,00						
+3,50	+3,50						
+3,25	+3,25						
+3,00	+3,00						
+2,75	+2,75		cil	cil		cil	
+2,50	+2,50		-0,75	-1,25		-1,75	
+2,25	+2,25						
+2,00	+2,00						
+1,75	+1,75						
+1,50	+1,50						
+1,25	+1,25						
+1,00	+1,00						
+0,75	+0,75						
+0,50	+0,50						
+0,25	+0,25						

ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM DIOPTRIAS CILÍNDRICAS
Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75



**VISIÓN CLARA CON
UNA GRAN RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO¹**



ACUVUE® 2

🕒 PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios con miopía o hipermetropía. Ideales para quienes no se adaptan a lentes de contacto de hidrogel de silicona.

🕒 BENEFICIOS


- Fácil manipulación.
- Amplia gama de parámetros.
- Lentes ultra finos para una visión cómoda.
- Protección UV clase 2: **salud ocular.**

1. JJV Datos en Archivo 2018. Declaraciones de la Marca Principal ACUVUE® sobre el Rendimiento Clínico y las Propiedades Generales del Material.

TECNOLOGÍA

Diseño con altura de bordes reducida:

- Facilita el paso de la lágrima.
- Reduce el roce del párpado con el lente durante el parpadeo

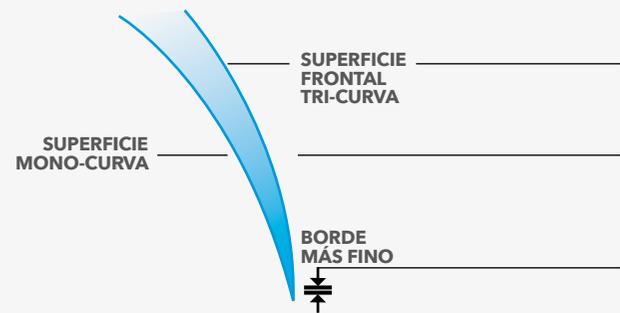

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODALIDAD

USO	Uso diario o extendido
PROGRAMA DE REEMPLAZO	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
PRESENTACIÓN	Caja con 6 lentes
ERROR DE REFRACCIÓN	Miopía e hipermetropía

PARÁMETROS

CURVA BASE mm	8.7 (a pedido 8.3)
DIÁMETRO TOTAL mm	14.0
DIOPTRIAS DISPONIBLES	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D +6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Etafilicon A Hidrogel	AGENTE HUMECTANTE <i>Interior del Lente</i>	No posee
CONTENIDO DE AGUA	58%	FLEXIBILIDAD <i>Módulo MPa</i>	0.27
TRANSMISIBILIDAD <i>Dk/t central</i>	25.5 x 10 ⁻⁹	ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO	63
PROTECCIÓN UV	Clase 2 (99% UVB, 88% UVA)	TINTE DE VISIBILIDAD	Si (azul claro)
ESPESOR CENTRAL mm	0.084 (para -3.00D)	INDICADOR DERECHO - REVÉS	Si, 123

LENSES DE CONTACTO DE USO ÚNICO Y REEMPLAZO DIARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	 ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™	 ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™ FOR ASTIGMATISM
Programa de Reemplazo	Uso Único y Reemplazo Diario	Uso Único y Reemplazo Diario
Uso	Uso Diario	Uso Diario
Presentación	30 Pack	30 Pack
Agente Humectante	HydraLuxe™	HydraLuxe™
Material	Senofilcon A	Senofilcon A
Transmisibilidad Dk/t¹ (borde corregido)	121 x 10 ⁻⁹	129 x 10 ⁻⁹
Contenido de Agua	38%	38%
Tinte de visibilidad	Si	Si
Protección UV††	Clase 1 96% UVA y 99.9% UVB	Clase 1 96,7% UVA y 99,99% UVB
Marca I/O		No
Marca de Orientación	No	Vertical
Espesor Central mm -3.00 D	0.085	0.080
Parámetros BC (mm) / Diametro (mm) Rango de poder (D)	8.5/14.3 -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D) +6.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D)	8.5/14.3 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

†Ayuda a proteger la córnea y el ojo de los nocivos rayos UV. ‡NOTA: La exposición a largo plazo a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados con las cataratas. La exposición se basa en una serie de factores, tales como las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con bloqueador UV ayudan a proporcionar protección contra la radiación UV perjudicial. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contactos con bloqueador UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos de la visión. Consulte a su profesional de la visión para obtener más información.



**1-DAY ACUVUE® MOIST
WITH LACREON®**



**1-DAY ACUVUE® MOIST
FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®**



**1-DAY ACUVUE® MOIST
MULTIFOCAL WITH LACREON®**

Uso Único y Reemplazo Diario	Uso Único y Reemplazo Diario	Uso Único y Reemplazo Diario
Uso Diario	Uso Diario	Uso Diario
30 Pack	30 Pack	30 Pack
LACREON®	LACREON®	LACREON®
Etafilcon A	Etafilcon A	Etafilcon A
25.5 x 10 ⁹	23.8 x 10 ⁹	25.5 x 10 ⁹
58%	58%	58%
Si	Si	Sí
Clase 2 82% UVA y 97% UVB	Clase 2 82% UVA y 97% UVB	Clase 2 82% UVA y 97% UVB
	No	
No	Vertical	No
0.084	0.090	0.084
8.5 / 14.2 -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D) 9.0 / 14.2 -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D)	8.5/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.4/14.3 +6.00D a -9.00D (en pasos de 0.25D) ADDS: LOW: +0.75D a +1.25D MID: +1.50D a +1.75D HIGH: +2.00D a +2.50D

LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	 ACUVUE® OASYS WITH HYDRACLEAR® PLUS	 ACUVUE® OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR® PLUS	 ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL
Programa de Reemplazo	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
Uso	Uso diario o extendido	Uso diario o extendido	Diario o Extendido
Presentación	6 Pack	6 Pack	6 Pack
Agente Humectante	HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS
Material	Senofilcon A	Senofilcon A	Senofilcon A
Transmisibilidad Dk/t¹ (borde corregido)	147 x 10 ⁻⁹	129 x 10 ⁻⁹	147 x 10 ⁻⁹ (-3.00 D)
Contenido de Agua	38%	38%	38%
Tinte de visibilidad	Si	Si	Si
Protección UV**	Clase 1 96,1% UVA y 99,99% UVB	Clase 1 >96,1% UVA y >99,99% UVB	Clase 1 96.1% UVA , 99.99% UVB
Marca I/O		No	
Marca de Orientación	No	Vertical	No
Espesor Central mm -3.00 D	0.070	0.080	0.07
Parámetros BC (mm) / Diametro (mm) Rango de poder (D)	8.4-8.8/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D sobre +6.00D y sobre -6.00D)	Plano a -6,00D (pasos de 0,25D) Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75 Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°) Cilindro: -2,25, -2,75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° De -6,50D a -9,00D (pasos de 0,50D) Cilindro: -0,75, -1,25 Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°) Cilindro: -1,75, -2,25, -2,75 Ejes: 10°, 20°, 160°, 170°, 180° De +0,25D a +6,00D (pasos de 0,25D) Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.4/14.3 -9.00D a +6.00D (en pasos de 0.25D) ADDS: LOW: +0.75D a +1.25D MID: +1.50D a +1.75D HIGH: +2.00D a +2.50D

†Ayuda a proteger la córnea y el ojo de los nocivos rayos UV. ‡NOTA: La exposición a largo plazo a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados con las cataratas. La exposición se basa en una serie de factores, tales como las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con bloqueador UV ayudan a proporcionar protección contra la radiación UV perjudicial. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contactos con bloqueador UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos de la visión. Consulte a su profesional de la visión para obtener más información.



ACUVUE® VITA™



**ACUVUE® VITA™
FOR ASTIGMATISM**



ACUVUE® 2

Uso diario,
reemplazo mensual

Uso diario,
reemplazo mensual

Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)

Uso diario

Uso diario

Uso diario o extendido

6 Pack

6 Pack

6 Pack

HydraMax™

HydraMax™

Senofilcon C

Senofilcon C

Etafilcon A

147 x 10⁻⁹

129 x 10⁻⁹

25.5 x 10⁻⁹

41%

41%

58%

Si

Si

Si

Clase 1
93.4% UVA y 99.8% UVB

Clase 1
93.4% UVA y 99.8% UVB

Clase 2
88% UVA y 99% UVB



No



No

Vertical

No

0.07

0.08

0.084

8.4/14.0
-0.50 a -6.00D
(en pasos de 0.25D)
-6.50D a -12.00D
(en pasos de 0.50D)
+0.50D a +6.00D
(en pasos de 0.25D)
+6.50D a +8.00D
(en pasos de 0.50D)

8.6/14.5
Plano a -6.00D
(en pasos de 0.25D)
Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75
Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°

Cilindro: -2.25
Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

-6.50D a -9.00D
(en pasos de 0.50D)
+0.25D a +4.00D
(en pasos de 0.25D)
Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75
Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

8.3/14.0
-0.50D a -12.00D
+0.50D a +8.00D
(en pasos de 0.50D sobre
+6.00D y sobre -6.00D)

8.7/14.0
-0.50D a -12.00D
+0.50D a +8.00D
(en pasos de 0.50D sobre
+6.00D y sobre -6.00D)

JNJ VISION PRO



Ingrese hoy a nuestra red profesional jnjvisionpro.cl

ACUVUE®

www.jnjvisionpro.cl

 /ACUVUEPROCL

MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN SOLO ENTRE PROFESIONALES DE LA VISIÓN. MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL DE LA VISIÓN. Los lentes de contacto ACUVUE® son indicados para la corrección de la visión. Como ocurre con todos los lentes de contacto, pueden desarrollar problemas oculares, inclusive úlceras en la córnea. Los lentes no deben ser prescritos si los pacientes presentan: Inflamación o infección alrededor o dentro de los ojos o párpados; cualquier enfermedad, lesión o anomalía ocular que afecte la córnea, la conjuntiva o los párpados; cualquier afección diagnosticada previamente que hace que el uso de lentes de contacto resulte incómodo; ojo seco grave; disminución de la sensibilidad corneal; cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar el ojo o exacerbarse al usar lentes de contacto; reacciones alérgicas en la superficie o en los tejidos adyacentes del ojo que puedan inducirse o exacerbarse al usar lentes de contacto o soluciones para lentes de contacto; cualquier infección ocular activa; si aparece enrojecimiento o irritación ocular; irritación de los ojos causada por reacciones alérgicas a ingredientes contenidos en soluciones para lentes de contacto, dado que estas soluciones pueden contener sustancias químicas o conservantes (tales como el mercurio, el timerosal, etc.) que pueden causar una respuesta alérgica en algunas personas. Productos de venta bajo receta médica. Para más información sobre uso, cuidados de mantenimiento y seguridad, consulte a su profesional de la visión, llame al centro de atención al cliente 123-0020-1192, visite www.acuvue.cl o escríbanos a contactenos.cl@acuvue.com. Johnson & Johnson de Chile S.A. Calle Cerro Colorado N°5240, Torre 1, Piso 9. Las Condes, Santiago. **ADVERTENCIA:** LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN DE RAYOS UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción de rayos UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción de rayos UV, según lo indicado. **ACUVUE®; ACUVUE® OASYS with HYDRACLEAR® PLUS; ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS; 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®; 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®; 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL with LACREON®, ACUVUE® OASYS 1-Day with HYDRALUXE™, ACUVUE® OASYS 1-Day with HYDRALUXE™ for ASTIGMATISM, ACUVUE® VITA, ACUVUE® VITA for ASTIGMATISM ; ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL; ACUVUE® 2; EYE INSPIRED™; INTUISIGHT™** son marca registrada de Johnson & Johnson Vision Care, Inc. © Johnson & Johnson de Chile S.A. 2023. Todos los derechos reservados.