



מדריך להתאמת עדשות המגע המולטיפוקליות של ACUVUE®

קביעת ADDITION קבע את ה-ADD המינימלי בהתאם לצרכי המטופל שיפורי ראייה במידת הצורך, שפר את ביצועי הראייה למרחק או לקרוב, בעזרת טבלת השיפורים (B). שים לב כי Over refraction אינה מומלצת	קבע את העין הדומיננטית בשיטה הסנסורית - מבחן טשטוש לרחוק עם עדשת +1.00 הערכת איכות הראייה לאחר 10 דק של הסתגלות הערך את איכות הראייה הדו עינית של המטופל בתנאים טבעיים (מחוץ לחדר הבדיקה)	בצע בדיקת רפרקציה חדשה (מומלץ עד 500ms) - קבע את ה SE בהתאמה - בחר את הספייר בעל המינוס המינימלי תוך כדי יישום תיקון VD בחר זוג עדשות הראשון בהתאם למחשבון / טבלת ההתאמה (A)
---	---	--

שיפורי ראייה לקרוב (B)		שיפורי ראייה לרחוק (B)		בחר זוג עדשות ראשון להתנסות (A)		עוצמה ADD
עין לא דומיננטית	עין דומיננטית	עין לא דומיננטית	עין דומיננטית	עין לא דומיננטית	עין דומיננטית	
			עדשה ספרית של ACUVUE®			+0.750D עד +1.25D
						+1.50D עד +1.75D
						+2.00D עד +2.50D

*להוסיף +0.25D לרפרקציה בעין הלא דומיננטית

מחשבון ההתאמה - עדשות מגע מולטיפוקליות ACUVUE®

סרקו את הקוד או בקרו באתר: www.jnjvisioncare.co.il/5minfit



1. נתונים מקובץ 2022 JNJ. טכנולוגיה בשם "התאמה מיטבית לאישון" עדשות מגע JNC, מאפייני עיצוב ויתרונות מקושרים. **מידע בטיחותי חשוב:** עדשות מגע ACUVUE מיועדות לשימוש על פי מרשם אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים בלבד. בעדשות מגע ACUVUE ניתן להשתמש לתיקון ראייה. כמו בכל עדשות המגע, בעיות עיניים, כולל כיבים בקרנית, יכולות להתפתח. חלק מהמרכיבים עלולים לחוות גירוי קל, גירוד או אי נוחות. אין להשתמש בעדשות מגע במקרה של דלקות עיניים או כל בעיות עיניים אחרות, או במקרה של מחלה מערכתית העלולה להשפיע על העין. לפני השימוש, לקבלת מידע מפורט על המוצרים ומידע בטיחות חשוב, כולל התוויות נבד, אמצעי זהירות ותגובות שליליות יש לעין בהוראות השימוש או לבקר באתר ג'ונסון & ג'ונסון www.jnjvisioncare.co.il/Instructions-for-Use.