

# Din raske og enkle guide for vellykket multifokal tilpasning



ACUVUE® MULTIFOCAL familien.  
Produktbilder er kun ment som illustrasjon.

**1**

## UTFØR NY BRILLEREFRAKSJON

- Sylinder  $\leq -0.75D$ :  
Tilpass med **MULTIFOCAL**
- Sylinder  $-1.00D$  og  $-1.25D$ :  
Tilpass med **MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**
- Sylinder  $-1.50D$  og  $-1.75D$ :  
Tilpass med **MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**, med et tillegg på  $-0.25D$  til sfærisk styrke

**2**

## BESTEM SENSORISK DOMINANT ØYE

Beregn deretter toppunktavstanden for både sfær- og sylindrestyrke.  
Få hjelp fra ACUVUE® Simplifit for denne beregningen og finn styrken på prøvelinsene!

[jnvisionpro.com/en-no/calculators/acuvue-fitting-calculator](http://jnvisionpro.com/en-no/calculators/acuvue-fitting-calculator)

**3**

## BESTEM FUNKSJONELL ADD

ACUVUE®  
**simplifit**  
Your digital fitting consultant



| ØYE               | ADD               | FØRSTE LINSEVALG                      | FORBEDRING AV LANGSYN                                  | FORBEDRING AV NÆRSYN                                               |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dominant øye      | +0.75D til +1.25D | <input checked="" type="radio"/> LOW  | SFÆRISK ELLER TORISK                                   | <input checked="" type="radio"/> LOW                               |
| Ikke-dominant øye |                   | <input checked="" type="radio"/> LOW  |                                                        | <input checked="" type="radio"/> LOW<br>+0.25D på avstandsstyrken  |
| Dominant øye      | +1.50D til +1.75D | <input type="radio"/> MID             | <input checked="" type="radio"/> LOW                   | <input checked="" type="radio"/> LOW                               |
| Ikke-dominant øye |                   | <input type="radio"/> MID             | <input type="radio"/> MID                              | <input type="radio"/> MID<br>+0.25D på avstandsstyrken             |
| Dominant øye      | +2.00D til +2.50D | <input type="radio"/> MID             | <input type="radio"/> MID                              | <input type="radio"/> MID                                          |
| Ikke-dominant øye |                   | <input checked="" type="radio"/> HIGH | <input type="radio"/> MID<br>+0.25D på avstandsstyrken | <input checked="" type="radio"/> HIGH<br>+0.25D på avstandsstyrken |

## SAMMENDRAG AV HVORDAN DU MODIFISERER DET FØRSTE PARET PRØVELINSER

### For å forbedre **LANGSYN**:

- Ved LOW ADD, fjern ADD i det dominante øyet
- Ved MID ADD, senk ADD i det dominante øyet
- Ved HIGH ADD, senk ADD i det ikke-dominante øyet og legg til +0.25D

### For å forbedre **NÆRSYN**:


- Legg til +0.25D til det ikke-dominante øyet

### For å forbedre synet på **AVSTAND** og **NÆRT** hold ved skjev hornhinne:

- Hvis kunden har en sylinder på  $-0.75D$ , vurder å bruke MULTIFOCAL for ASTIGMATISM
- Juster akse hvis rotasjonen er  $\geq 10$  grader og det mistenkes at det påvirker synet negativt.



## Smarte tips og råd ved tilpasning

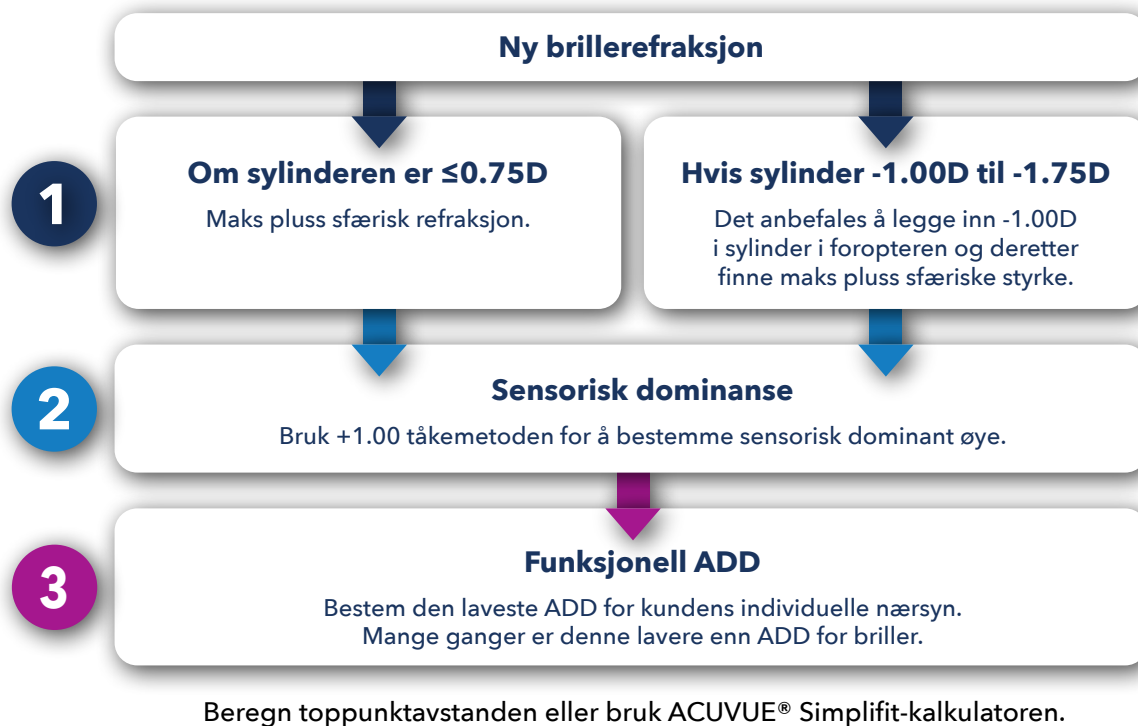

## Smarte tips og råd når du snakker med kunder

- 1** Sett inn styrkene fra trinn 1 i prøvebrillen og be kunden å se ut gjennom et butikkvindu. Plasser +0.25D binokulært foran prøvebrillen.
- 2** Kunden har styrkene fra trinn 1 i prøvebrillen og ser på synstavlen.
- 3** Kunden bruker prøvebrillen med avstandsstyrkene fra trinn 1.



«Er det noen forskjell med disse glassene?»

**Hvis det ikke er noen forskjell, eller kunden er nølende, legg til +0.25D.**

«Jeg skal gjøre det litt uklart for deg. Fortell meg hva som forstyrrer deg mest.»

**Plasser +1.00D vekselvis foran hvert øye. Øyet som er mest forstyrrer er sensorisk dominant.**

«Se på mobiltelefonen din»

**Uansett alder, begynn å sjekke hvis LOW ADD fungerer. Hvis kunden kan lese videre på en behagelig avstand, har du funnet den rette ADD. Det er ikke nødvendig å sammenligne med MID ADD hvis kunden er fornøyd.**

Bildene er kun ment som illustrasjon.

Kalkulatoren og denne tilpasningsveiledningen gis til optikere som en hjelp i forbindelse med tilpasning av ACUVUE® MULTIFOCAL kontaktlinser og erstatter ikke profesjonell vurdering.

**Viktig sikkerhetsinformasjon:** ACUVUE® kontaktlinser er indikert for synskorreksjon. Som med alle kontaktlinser kan det oppstå øyeproblemer, inkludert sår på hornhinnen. Noen brukere kan oppleve lett irritasjon, kløe eller ubehag. Kontaktlinser skal ikke brukes ved øyebetennelser eller andre øyesykdommer, eller dersom du har en systemisk sykdom som kan påvirke øyet. For detaljert informasjon, inkludert kontraindikasjoner, forholdsregler og bivirkninger, se bruksanvisningen som er tilgjengelig på Johnson & Johnson hjemmesiden <https://www.e-ifu.com/>. For mer informasjon, besøk Johnson & Johnson hjemmesiden [www.jnjvisioncare.no](http://www.jnjvisioncare.no).

© Janssen-Cilag AS 2025. ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL og ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM er varemerker som tilhører Johnson & Johnson. 2025PP12879. VIS-250147-1-No