

Din snabba & enkla guide för lyckad multifokal tillpassning



ACUVUE® MULTIFOCAL familjen.
Produktbilder enbart för illustrativt syfte.

1

UTFÖR NY GLASÖGONREFRAKTION

- Cylinder $\leq -0.75D$:
Tillpassa med **MULTIFOCAL**
- Cylinder $-1.00D$ och $-1.25D$:
Tillpassa med **MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**
- Cylinder $-1.50D$ och $-1.75D$:
Tillpassa med **MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**, med ett tillägg på $-0.25D$ till den sfäriska styrkan

2

FASTSTÄLL SENSORISKT DOMINANT ÖGA

Beräkna därefter toppunktsavståndet för både sfär- och cylinderstyrka.

Ta hjälp av ACUVUE® Simplifit för denna beräkning samt hitta styrkan på prov-linserna!

jnvisionpro.com/en-se/calculators/acuvue-fitting-calculator

3

FASTSTÄLL FUNKTIONELL ADD

ACUVUE®
simplifit

Your digital fitting consultant



ÖGA	ADD	FÖRSTA LINSVALET	FÖRBÄTTRING AV AVSTÅNDSSYN	FÖRBÄTTRING AV NÄRSEENDE
Dominant öga	+0.75D till +1.25D	☒ LOW	SFÄRISK ELLER TORISK	☒ LOW
Icke-dominant öga		☒ LOW		☒ LOW +0.25D på avståndsstyrkan
Dominant öga	+1.50D till +1.75D	☐ MID	☒ LOW	☒ LOW
Icke-dominant öga		☐ MID	☐ MID	☐ MID +0.25D på avståndsstyrkan
Dominant öga	+2.00D till +2.50D	☐ MID	☐ MID	☐ MID
Icke-dominant öga		☒ HIGH	☐ MID +0.25D på avståndsstyrkan	☒ HIGH +0.25D på avståndsstyrkan

SAMMANFATTNING AV HUR DU KAN MODIFIERA FÖRSTA PROVPARET

För att förbättra **AVSTÅND**:

- Vid LOW ADD, ta bort ADD i det dominanta ögat
- Vid MID ADD, sänk ADD i dominant öga
- Vid HIGH ADD, sänk ADD i det icke-dominanta ögat och lägg till +0.25D

För att förbättra **NÄRA**:


- Addera +0.25D till det icke-dominanta ögat

För att förbättra **AVSTÅND** och **NÄRA** vid astigmatism:

- Om kunden har en cylinder på $-0.75D$, överväg att använda MULTIFOCAL for ASTIGMATISM
- Justera axelläget om rotationen är ≥ 10 grader och det misstänks att det påverkar synen negativt



Smarta tips och råd vid tillpassning

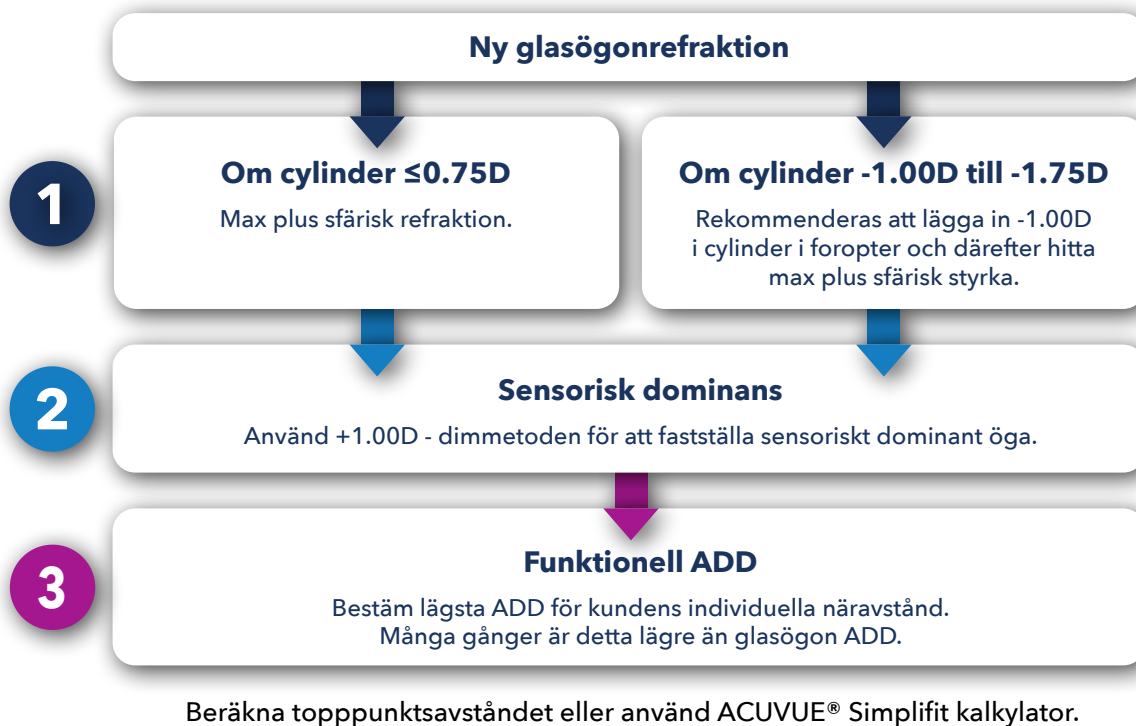

Smarta tips och råd vid kundsamtalet

- 1** Sätt in styrkorna från steg ett i provbågen och be kunden titta ut genom ett skyltfönster. Placera +0.25D binokulärt framför provbågen.
- 2** Kunden bär styrkor från steg 1 i provbågen och tittar på syntavlan.
- 3** Kunden bär provbågen med avståndstyrkor från steg 1.



"Blir det någon skillnad med dessa glas?"

Om ingen skillnad eller kunden tvekar, lägg till +0.25D.

"Jag kommer nu att göra det lite suddigt för dig. Säg till vilket som stör mest."

Sätt +1.00D växelvis framför varje öga. Det öga som störs mest är sensoriskt dominant.

"Titta på din mobiltelefon"

Oavsett ålder, börja kontrollera om LOW ADD fungerar. Om kunden kan läsa på ett bekvämt avstånd, har du hittat rätt ADD. Det är inte nödvändigt att jämföra med MID ADD om kunden är nöjd.

Bilderna är endast i illustrativt syfte

Kalkylatorn och denna tillpassningsguide tillhandahålls optiker som en hjälp, i samband med tillpassning av ACUVUE® MULTIFOCAL kontaktlinser och ersätter inte professionell bedömning.

Viktig säkerhetsinformation: ACUVUE® kontaktlinser är indikerade för synkorrigering. Precis som med alla kontaktlinser kan ögonproblem, inklusive sår på hornhinnan, förekomma. Vissa användare kan uppleva lätt irritation, klåda eller obehag. Kontaktlinser ska inte användas vid ögoninfektioner eller andra ögontillstånd eller i händelse av en systemisk sjukdom som kan påverkas. För detaljerad produktinformation, inklusive kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och biverkningar, se bruksanvisningen på Johnson & Johnsons hemsida <https://www.e-ifu.com/>. För ytterligare information, besök vår Johnson & Johnsons hemsida www.jnjvisioncare.se.

© Johnson & Johnson AB 2025. ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL och ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM är registrerade varumärken som tillhör Johnson & Johnson. 2025PP11753. VIS-250145-1-Sv