

ACUVUE® MULTIFOCAL

עם התאמה מיטבית לאישון

טיפים להתאמה מוצלחת

התאמה ב-3 שלבים

1

בצעו רפרקציה חדשה שמתאימה למרשם ספרי-טורי

קבעו תיקון ורטקס למרשם הספרי-טורי (או השתמשו במחשבון הדיגיטלי לשם כך).

• צילינדר $\geq -0.75D$: התאימו עדשה מולטיפוקלית

• צילינדר $0.00D$ - $1.25D$: התאימו עדשה מולטיפוקל לאסטיגמציה

• צילינדר $1.50D$ - $1.75D$: התאימו עדשה מולטיפוקל לאסטיגמציה והוסיפו תוספת של $0.25D$ למרשם

2

קבעו עין דומיננטית

השתמשו במבחן טשטוש $+1.00$ לקביעת עין דומיננטית בשיטה הסנסורית.

3

קבעו כוח ADD פונקציונלי

יש לקבוע את כוח ה-ADD המינימלי לראיה לקרוב. מתן כוח ADD גבוה מידי, עלול לפגוע בראיה לרחוק.



קעת אפשר למצוא את העדשה הנכונה בקלות
ובמהירות בעזרת **מחשבון ההתאמה הדיגיטלי**
בכתובת: www.jnjvisionpro.com

שיפורי ראייה	
שיפור ראייה לקרוב	שיפור ראייה לרחוק
LOW	ספרי או טורי
LOW להוסיף +0.25D למרחק	LOW
MID	LOW
MID להוסיף +0.25D למרחק	MID
MID	MID
HIGH להוסיף +0.25D למרחק	MID להוסיף +0.25D למרחק

בחירת עדשה ראשונית		
עוצמה	עין	בחירת עדשה
+0.75D עד +1.25D	עין דומיננטית	LOW
	עין לא דומיננטית	LOW
+1.50D עד +1.75D	עין דומיננטית	MID
	עין לא דומיננטית	MID
+2.00D עד +2.50D	עין דומיננטית	MID
	עין לא דומיננטית	HIGH

לשיפור ראייה למרחק ולקרוב:

- אם המטופל בעל צילינדר ≤ -0.75 , שקול התאמה של עדשת מולטיפוקל לאסטיגמציה.
- יש לכוון את הציר אם קיימת סיבוביות של ≤ 10 מעלות וקיים חשד שסיבוב העדשה משפיע לרעה על הראייה.

לשיפור ראייה למרחק:

- עבור LOW ADD - MID-1 הורד את ה-ADD בעין הדומיננטית.
- עבור HIGH ADD - הורד את ה-ADD בעין הלא-דומיננטית והוסיף +0.25D.

לשיפור ראייה לקרוב:

- הוסיף +0.25D לעין הלא-דומיננטית.

**אפשר למטופל לבלות 10 דקות מחוץ לחדר הבדיקה
"בעולם האמיתי" לפני שתעבור לבדיקת ביצועי הראייה**



המחשבוניים מסופקים לאנשי המקצוע כמקור נוחות לצד ההתוויה של עדשות המגע ACUVUE® MULTIFOCAL ואינם מהווים תחליף לשיקול דעת מקצועי. **מידע בטיחותי חשוב:** עדשות מגע ACUVUE® מיועדות לשימוש על פי מרשם אופטומטריסט מורשה או רופא עיניים בלבד. בעדשות מגע ACUVUE® ניתן להשתמש לתיקון ראייה. כמו בכל עדשות המגע, בעיות עיניים, כולל כיבים בקרנית, יכולות להתפתח. חלק מהמרכיבים עלולים לחוות גירוי קל, גירוד או אי נוחות. אין להשתמש בעדשות מגע במקרה של דלקות עיניים או כל בעיות עיניים אחרות, או במקרה של מחלה מערכתית העלולה להשפיע על העין. לפני השימוש, לקבלת מידע מפורט על המוצרים ומידע בטיחות חשוב, כולל התוויות נבד, אמצעי זהירות ותגובות שליליות יש לעיין בהוראות השימוש או לבקר באתר ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן: www.injvisionpro.com/he-il/instructions-for-use. ACUVUE®. הינו שם מסחרי רשום של Johnson & Johnson ו/או מי מהחברות הקשורות אליה. © ג'יי - סי הלתי קר בע"מ 2026. 2026PP08381