

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
**ACUVUE®**



**ACUVUE®**



# LENTES DE CONTACTO **INSPIRADOS EN LOS OJOS\***

EYE-INSPIRED™  INNOVATIONS



Los lentes de contacto de la marca ACUVUE® te brindan la comodidad y la nitidez de las INNOVACIONES EYE-INSPIRED™

\*JYV Data on File 2020. ACUVUE Brand - Eye-Inspired Innovations. <sup>1</sup>Agente humectante no aplica para ACUVUE® 2, dado que no lo tiene en su formulación. <sup>†</sup>Todos los lentes de contacto Acuvue contienen un bloqueador UV que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. **ADVERTENCIA:** LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado. Las imágenes de los productos son para fines ilustrativos ACUVUE®; EYE INSPIRED™ INNOVATIONS son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care Companies, Inc. © Johnson & Johnson de Chile S.A. 2023. Todos los derechos reservados.

# EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS

Presente en el Portafolio  
de Productos ACUVUE®



## AGENTE HUMECTANTE PARA HIDRATACIÓN

No solo recubierto, sino con una formulación que imita los componentes clave de la lágrima para ayudar a los ojos a sentirse frescos todo el día.<sup>1,2,3</sup>



## BLOQUEO DE RAYOS UV<sup>4</sup> PARA LA SALUD DE LOS OJOS

El material del lente ayuda a proporcionar protección contra la transmisión de los rayos UV-A y UV-B.<sup>1,4</sup>



## BORDE INVISIBLE PARA COMODIDAD

Un borde ultra delgado que se adapta a la forma natural de su ojo para una máxima comodidad al usar lentes y una sensación casi invisible.<sup>2</sup>



## ESTABILIZACIÓN POR PARPADEO PARA ASTIGMATISMO

Cuatro zonas estabilizadoras del párpado que funcionan con su parpadeo natural para una visión consistente, clara y estable.<sup>2</sup>



## ANTIOXIDANTES PARA APOYO A LA COMODIDAD

Antioxidantes incrustados dentro del lente para ayudar a brindar comodidad.<sup>1,5</sup>



## OPTIMIZADO PARA LA PUPILA PARA VISIÓN MULTIFOCAL

Tecnología multifocal que tiene en cuenta las variaciones naturales en el tamaño de la pupila para garantizar una corrección de visión casi personalizada de cerca y de lejos<sup>1</sup>

1. JJV data on file 2018. ACUVUE® Brand - EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS. 2. JJV data on file 2018\* ACUVUE® Brand Contact Lenses Clinical Performance and Overall Material Properties. 3. No other contact lens manufacturer utilizes high molecular weight PVP in their lenses or the patented technologies used to combine it with various lens materials. It is unique to the ACUVUE® Brand. 4. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado. 5. As shown in a laboratory study and on a mass basis.

## LENTES DE CONTACTO DE USO ÚNICO Y REEMPLAZO DIARIO

Página | 09



HIDROGEL DE SILICONA  
**ACUVUE® OASYS 1-DAY  
WITH HYDRALUXE™**

Comodidad insuperable con la practicidad de los desechables diarios\*<sup>1</sup>

### PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan corrección de la visión y ejercen múltiples actividades todos los días.

Página | 11



HIDROGEL  
**1-DAY ACUVUE® MOIST  
WITH LACREON®**

Rendimiento probado en el que puede confiar<sup>2</sup>

### PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan conveniencia, comodidad y libertad de movimiento.

\*Diseñado para respaldar las funciones de la película lagrimal. <sup>1</sup>JJV datos en archivo 2021. Definición de la Tecnología HydraLuxe® <sup>2</sup>. Datos en Archivo 2021. Liberación activada por parpadeo de los agentes humectantes DAILIES AquaComfort Plus en comparación con la tecnología LACREON de 1-DAY ACUVUE® MOIST.

## LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | 13

HIDROGEL

**1-DAY ACUVUE®  
MOIST PARA  
ASTIGMATISMO CON  
LACREON®  
(ETAFILCON A)**

Rendimiento probado en el que puede confiar mientras mantiene la visión clara y estable\*

**PERFIL DEL USUARIO**

Para quienes buscan tener una visión estable con practicidad y comodidad.

Página | 18

HIDROGEL DE SILICONA  
**ACUVUE® OASYS CON  
HYDRACLEAR® PLUS**

Comodidad insuperable\*\*1

**PERFIL DEL USUARIO**

Para quienes poseen un estilo de vida que exige más, de parte de los lentes de contacto, como trabajar largas horas frente a la computadora, en ambientes secos o con aire acondicionado.

\*. JJV datos en archivo 2021. Lentes de contacto ACUVUE® para ASTIGMATISMO - Éxito general en la adaptación, posición de la orientación, estabilidad rotacional y desempeño de la visión. \*\*www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. 1. Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov

## LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | 20



### HIDROGEL DE SILICONA **ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR® PLUS**

Comodidad insuperable mientras mantiene la visión clara y estable<sup>\*1,2</sup>

#### PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios existentes o nuevos, de lentes de contacto para astigmatismo, que buscan calidad y estabilidad visual en las actividades diarias.

Página | 27



### HIDROGEL DE SILICONA **ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL CON DISEÑO DE PUPILA OPTIMIZADA**

Visión clara para todas las distancias<sup>\*\*3</sup>

#### PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios presbítas que buscan una visión clara en todas las distancias, de cerca, de lejos y en distancias intermedias.<sup>4</sup>

<sup>\*</sup>www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. **1.** Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov **2.** JJV Datos en Archivo 2018. Similitudes entre Mucina y Poli(N-Vinil Pirrolidona) (PVP). **3.** JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits **4.** JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY: Lentes de contacto JJVC, características de diseño y beneficios asociados.

## LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | 29



HIDROGEL DE SILICONA

**ACUVUE® VITA™**Hidratación y comodidad durante todo el mes de uso<sup>1</sup>**PERFIL DEL USUARIO**

Para pacientes que desean el esquema de reemplazo y asequibilidad de un lente mensual pero quieren evitar la pérdida de comodidad a lo largo del mes<sup>2</sup>

Página | 31



HIDROGEL DE SILICONA

**ACUVUE® VITA™****PARA ASTIGMATISMO**Hidratación y comodidad durante todo el mes de uso, manteniendo la visión clara y estable<sup>1,3</sup>**PERFIL DEL USUARIO**

Para pacientes astigmatas que desean el esquema de reemplazo y asequibilidad de un lente mensual pero quieren evitar la pérdida de comodidad a lo largo del mes<sup>1,4,5</sup>

1. JJV datos en archivo 2017, Definición de la Tecnología HydraMax® 2. Nichols J et al. Taller internacional TFOS sobre molestias CL. IOVS 2013;54. 3. JJV datos en archivo 2018. Diseño de lentes de contacto ACUVUE® VITA® para ASTIGMATISMO. 4. Datos de archivo JJVC 2017, Desempeño subjetivo y resultados clínicos de ACUVUE® VITA™ Brand Contact Lenses with HydraMax™ Technology for ASTIGMATISM 5. Datos de archivo JJVC 2017, Éxito general de adaptación de las lentes de contacto ACUVUE® para astigmatismo, orientación correcta, certeza rotacional y rendimiento visual.

## LENTES DE CONTACTO DE REEMPLAZO PROGRAMADO

Página | **36**



### HIDROGEL **ACUVUE® 2**

Visión clara con una gran relación  
calidad-precio\*

### PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios con miopía o hipermetropía. Ideales  
para quienes no se adaptan a lentes de contacto  
de hidrogel de silicona.

\*JJV Datos en Archivo 2018. Declaraciones de la Marca Principal ACUVUE® sobre el Rendimiento Clínico y las Propiedades Generales del Material.



**COMODIDAD  
INSUPERABLE CON  
LA PRACTICIDAD DE  
LOS DESECHABLES  
DIARIOS\*,1**



**HYDRALUXE™**



## ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™

### ⦿ PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan corrección de la visión y ejercen múltiples actividades todos los días.


### ⦿ BENEFICIOS

- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular**<sup>2</sup>
- Tecnología HydraLuxe™, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad**<sup>2</sup>
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad**<sup>2</sup>
- Protección UV clase 1: **salud ocular**<sup>3</sup>
- Superficie suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad**<sup>2</sup>
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente<sup>1</sup>

\*Diseñado para respaldar las funciones de la película lagrimal. 1.JJV datos en archivo 2021. Definición de la Tecnología HydraLuxe® 2. MEYLER, J.; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. 3. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a la protección de la radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de los anteojos de sol con bloqueador UV, ya que los lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante.

## TECNOLOGÍA

La Tecnología HydraLuxe™ emplea un diseño de lágrima infundido. Una red aumentada de moléculas semejantes a la de la lágrima mimetiza las mucinas para ayudar a mantener la película lagrimal estable.\*

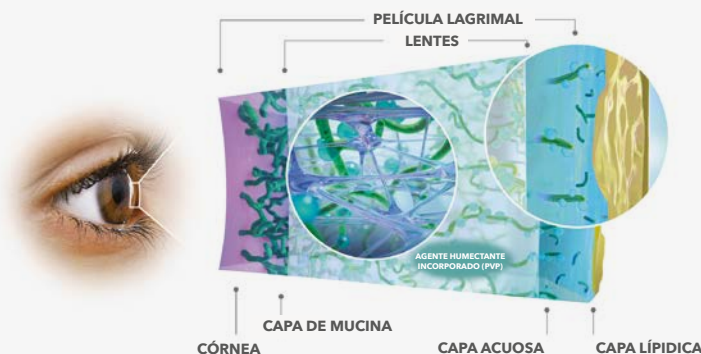

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Uso único
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Reemplazo diario
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 30 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Miopía e hipermetropía

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.5
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.3
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D +6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

### CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL</b>	Senofilcon A Hidrogel de Silicona	<b>AGENTE HUMECTANTE</b> <i>Interior del Lente</i>	Tecnología HydraLuxe™
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	38%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.68
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	$121 \times 10^{-9}$ (para -3.00D)	<b>ÁNGULO DE CONTACTO</b> <b>DINÁMICO</b>	50
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 1 (99.9% UVB, 96% UVA)	<b>TINTE DE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.085 (para -3.00D)	<b>INDICADOR DERECHO -</b> <b>REVÉS</b>	Si, 123

\*Clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 6 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como un criterio de valoración principal o secundario para ACUVUE® OASYS 1-Day con tecnología HydraLuxe® vs. productos de la competencia. Revisión realizada al 30 de abril de 2023.

**RENDIMIENTO  
PROBADO EN EL QUE  
PUEDE CONFIAR\***



LACREON®

## 1-DAY ACUVUE® MOIST WITH LACREON®

### ● PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan conveniencia, comodidad y libertad de movimiento.<sup>1</sup>

### ● BENEFICIOS


- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular**<sup>1</sup>
- Tecnología Lacreon®, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad**<sup>1</sup>
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad**<sup>1</sup>
- Protección UV clase 2: **salud ocular**<sup>2</sup>
- Superficie suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad**<sup>1</sup>
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente<sup>1</sup>

\*Datos en Archivo 2021. Liberación activada por parpadeo de los agentes humectantes DAILIES AquaComfort Plus en comparación con la tecnología LACREON de 1-DAY ACUVUE® MOIST 1. MEYLER, J.; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. 2. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado.

## TECNOLOGÍA

La tecnología LACREON® incorpora al material del lente un agente humectante que retiene la humedad y reproduce la lubricación natural de la película lagrimal.

Lentes más suaves e hidratados que ofrecen comodidad prolongada a lo largo del día.<sup>1</sup>

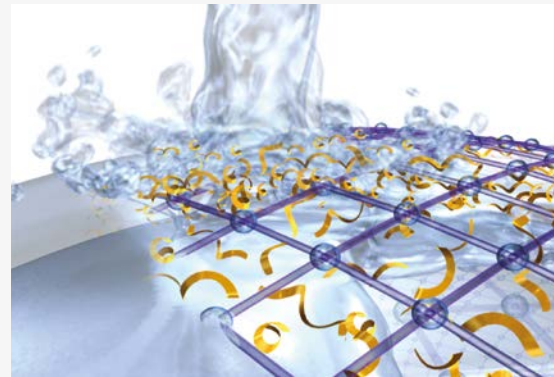

Contenido de agua<sup>2</sup>



Agente humectante<sup>2</sup>



Matriz del material del lente<sup>2</sup>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Uso único
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Reemplazo diario
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 30 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Miopía e hipermetropía

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.5 (9.0 a pedido)
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.2
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D

### CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Etafilcon A Hidrogel	AGENTE HUMECTANTE	Tecnología LACREON® <i>Interior del Lente</i>
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	58%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.26
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	25,5 x 10 <sup>-9</sup>	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO</b>	84
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 2 (97% UVB, 82% UVA)	<b>TINTE DE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.084 (para -3.00D)	<b>INDICADOR DERECHO - REVÉS</b>	Si, 123
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	88%	<b>SUAVIDAD</b> <i>Coefficiente de fricción</i>	0.02

1. VEYS, J; MEYLER, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician; 2006; 6046 (231): 34-6. 2. Conclusión elaborada por Johnson & Johnson Vision Care, basada en el modo de uso según la guía de instrucciones para el usuario. 2. Imágenes sólo para fines ilustrativos.

**RENDIMIENTO  
PROBADO EN EL QUE  
PUEDE CONFIAR  
MIENTRAS MANTIENE  
LA VISIÓN CLARA Y  
ESTABLE<sup>1</sup>**



LACREON®



## 1-DAY ACUVUE® MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON® (ETAFILCON A)

### ● PERFIL DEL USUARIO

Para quienes buscan tener una visión estable con practicidad y comodidad.

### ● BENEFICIOS

- Un lente nuevo y limpio cada día: **salud ocular<sup>2</sup>**
- Tecnología Lacreon®, que retiene la humedad en el lente y lo mantiene hidratado por más tiempo: **comodidad<sup>2</sup>**
- No acumula depósitos, no requiere estuches, soluciones o cuidados de mantenimiento: **comodidad y practicidad<sup>2</sup>**
- Protección UV clase 2: **salud ocular<sup>3</sup>**
- Superficie del lente suave y con fricción reducida, la cual hace que el párpado se deslice sobre el lente con más facilidad y menos irritación: **comodidad<sup>2</sup>**
- Sensación de comodidad y frescura desde el inicio al final del período de uso, debido al agente humectante que mantiene la hidratación incorporada al material del lente<sup>2</sup>

1. JVV datos en archivo 2021. Lentes de contacto ACUVUE® para ASTIGMATISMO - Éxito general en la adaptación, posición de la orientación, estabilidad rotacional y desempeño de la visión. 2. MEYLER, J.; VEYS, J. ¿Las nuevas lentes desechables diarias mejoran la comodidad del paciente? Optician. 2006; 6046 (231): 34-6. 3. Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV perjudicial a la córnea y al interior del ojo. ADVERTENCIA: LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción UV, según lo indicado.

## TECNOLOGÍA

El Diseño de Estabilización por Parpadeo. (DEP) usa el movimiento natural del parpadeo para estabilizar los lentes, brindando una adaptación más rápida, mayor comodidad y calidad de visión.<sup>1</sup>

Para mayor información sobre la tecnología DEP, ver las páginas 24 y 25.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Uso único
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Reemplazo diario
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 30 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Astigmatismo

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.5
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.5
<b>DIOPTRIAS DISPONIBLES</b>	<p>Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D)            Cilindro -0.75, -1.25, -1.75            Ejes: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°            Cilindro -2.25            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D)            Cilindro -0.75, -1.25, -1.75            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D)            Cilindro -0.75, -1.25, -1.75            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

### CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL</b>	Etafilicon A Hidrogel	<b>AGENTE HUMECTANTE</b> <i>Interior del Lente</i>	Tecnología LACREON®
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	58%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.27
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	23.8 x 10 <sup>-9</sup>	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO</b>	84
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 2 (97% UVB, 82% UVA)	<b>TINTE DE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.09 (para -3.00D)	<b>MARCA DE ORIENTACIÓN</b>	12h y 6h
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	87%	<b>SUAVIDAD</b> <i>Coefficiente de fricción</i>	0.022

<sup>1</sup>. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO NETO, A.A. La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA. GBR. 2009; 66 (33): 52-7.

## 1-DAY ACUVUE® MOIST® PARA ASTIGMATISMO CON LACREON® (ETAFILCON A)

POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		POTENCIAS NEGATIVAS CLAVES			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		Plano a -6.00 en pasos de 0.25D			
		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
OBLICUO	30°	•	•	•	
	40°	•	•	•	
	50°	•	•	•	
	60°	•	•	•	
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
	110°	•	•	•	•
OBLICUO	120°	•	•	•	
	130°	•	•	•	
	140°	•	•	•	
	150°	•	•	•	
	160°	•	•	•	•
CON LA REGLA	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		POTENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS ALTAS		
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-6,50 a -9,00 en pasos de 0,50D   +0.25 a +4.00 en pasos de 0.25D		
		-0.75	-1.25	-1.75
OBLICUO	30°			
	40°			
	50°			
	60°			
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•
	80°	•	•	•
	90°	•	•	•
	100°	•	•	•
	110°	•	•	•
OBLICUO	120°			
	130°			
	140°			
	150°			
	160°	•	•	•
CON LA REGLA	170°	•	•	•
	180°	•	•	•
	10°	•	•	•
	20°	•	•	•

● PARÁMETROS ACTUALES

## INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS								
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75
Plano	Plano									
-0,25	-0,25									
-0,50	-0,50									
-0,75	-0,75									
-1,00	-1,00									
-1,25	-1,25									
-1,50	-1,50									
-1,75	-1,75									
-2,00	-2,00									
-2,25	-2,25									
-2,50	-2,50									
-2,75	-2,75									
-3,00	-3,00									
-3,25	-3,25									
-3,50	-3,50									
-3,75	-3,75									
-4,00	-4,00									
-4,25	-4,00		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>	
-4,50	-4,25		<b>-0,75</b>		<b>-1,25</b>		<b>-1,75</b>		<b>-2,25</b>	
-4,75	-4,50									
-5,00	-4,75									
-5,25	-5,00									
-5,50	-5,00									
-5,75	-5,25									
-6,00	-5,50									
-6,25	-5,75									
-6,50	-6,00									
-6,75	-6,00									
-7,00	-6,50									
-7,25	-6,50									
-7,50	-6,50									
-7,75	-7,00									
-8,00	-7,00									
-8,25	-7,50									
-8,50	-7,50									
-8,75	-8,00									
-9,00	-8,00									
-9,50	-8,50									
-10,00	-9,00		<b>PRUEBE UN LENTE ESFÉRICO</b>							



1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON® DIOPTRIAS CILÍNDRICAS

Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25



## INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM with LACREON®, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS					
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00
+4,00	+4,25						
+3,75	+4,00						
+3,50	+3,50						
+3,25	+3,25						
+3,00	+3,00						
+2,75	+2,75		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>
+2,50	+2,50		<b>-0,75</b>		<b>-1,25</b>		<b>-1,75</b>
+2,25	+2,25						
+2,00	+2,00						
+1,75	+1,75						
+1,50	+1,50						
+1,25	+1,25						
+1,00	+1,00						
+0,75	+0,75						
+0,50	+0,50						
+0,25	+0,25						



1-DAY ACUVUE® MOIST FOR ASTIGMATISM WITH LACREON® DIOPTRIAS CILÍNDRICAS

Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75

**COMODIDAD  
INSUPERABLE\*<sup>1</sup>**



## ACUVUE® OASYS CON HYDRACLEAR® PLUS

### ● PERFIL DEL USUARIO

Para quienes poseen un estilo de vida que exige más de parte de los lentes de contacto, como trabajar largas horas frente a la computadora, en ambientes secos o con aire acondicionado.<sup>2</sup>


### ● BENEFICIOS

- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**<sup>3,4</sup>
- Tecnología Hydraclear® plus, que mantiene el lente hidratado durante todo el tiempo de uso, incluso en ambientes desafiantes: **comodidad**<sup>3,4</sup>
- Alta protección uv en lentes de contacto: **salud ocular**<sup>5</sup>
- Flexibilidad equilibrada que permite una adecuada adaptación a la superficie ocular: **comodidad y facilidad de manipulación**<sup>3,4</sup>
- Bajo coeficiente de fricción, cercano al de la córnea humana, lo que implica menor irritación del párpado superior en cada parpadeo y sensación de suavidad: **comodidad**<sup>4,6</sup>

\* [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. **1.** Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) **2.** Joven, G.; Riley, C.; Chalmers, R.; Hunt, C. Confort de Lentes de contacto con Hidrogel en entornos desafiantes y el efecto de reacondicionamiento con lentes de hidrogel de silicona. *Optometría y Ciencias de la Visión*, vol. 84: N° 4, pp 302-308. **3.** OSBORN, K & VEYS, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la seguridad relacionada con lentes de contacto. Parte 1 - Propiedades del material. *Optician*, 2005; 6004 (229): 39-41. **4.** Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de superficie ocular. Síntomas, signos y horas de uso incómodas en usuarios de lentes de contacto: el efecto de reajustar con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). *Eye & Contact Lens*, 2006; 32 (6): 281-286. **5.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a brindar protección contra la dañina transmisión de radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de anteojos de sol con bloqueador UV, y que las lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante. **6.** Francés, K.; Jones, L. Una década con hidrogeles de silicona. Parte 1. *Optometría de hoy*, 2008; 48: 42-6.

## TECNOLOGÍA

La tecnología HYDRACLEAR® PLUS incorpora un alto volumen de agente humectante a la estructura interna del material del lente, manteniéndolo más hidratado por más tiempo. Al estar incorporado al material del lente, el efecto del agente humectante no se desgasta a lo largo del tiempo de uso de los lentes, garantizando una comodidad superior, incluso en ambientes desafiantes para el uso de lentes de contacto, como largas horas trabajando frente a la computadora, en ambientes secos o con aire acondicionado.<sup>1,2,3</sup>

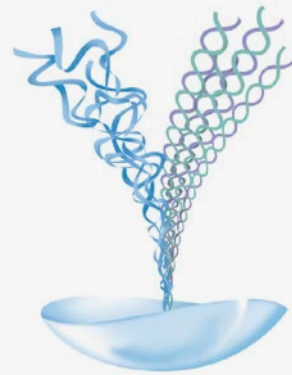

Cadena larga de molécula de agua



Exclusivo agente humectante interno



Exclusivo polímero de silicona capaz de retener agua

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Uso diario o extendido
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 6 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Miopía e hipermetropía

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.4 (8.8 a pedido)
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.0
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D +6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

### CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A Hidrogel de Silicona	AGENTE HUMECTANTE Interior del Lente	HIDRACLEAR® PLUS
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	38%	<b>FLEXIBILIDAD</b> Módulo MPa	0.68
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> Dk/t central	147 x 10 <sup>-9</sup>	<b>TIENE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 1 (99.9% UVB, 96.1% UVA)	<b>INDICADOR DERECHO - REVÉS</b>	Si, 123
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.07 (para -3.00D)	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO</b>	45
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	98%	<b>SUAVIDAD</b> Coeficiente de fricción	0.01

1. Joven, G.; Riley, C.; Chalmers, R.; Hunt, C. Hydrogel Lens Comfort en entornos desafiantes y el efecto de reacondicionamiento con lentes de hidrogel de silicona. Optometría y Ciencias de la Visión, vol. 84; N° 4, pp 302-308. 2. Osborn, K.; Veys, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la sequedad relacionada con lentes de contacto, parte 1, propiedades del material. Optician, 2005; 229 (6004): 39-41. 3. Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de superficie ocular. Síntomas, signos y horas de uso incómodas en usuarios de lentes de contacto: el efecto de reajustar con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). Eye & Contact Lens, 2006; 32 (6): 281-286. Lens, 2006; 32(6):281-286.

**COMODIDAD  
INSUPERABLE  
MIENTRAS  
MANTIENE LA  
VISIÓN CLARA  
Y ESTABLE\*<sup>1,2</sup>**



## ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR® PLUS

### ● PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios existentes o nuevos de lentes de contacto para astigmatismo, que buscan calidad de visión con comodidad.<sup>3,4</sup>


### ● BENEFICIOS

- Calidad visual y estabilidad constantes en las actividades dinámicas diarias del usuario<sup>3,4</sup>
- Alta protección uv en lentes de contacto: **salud ocular**<sup>5</sup>
- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**<sup>6,7,8</sup>
- Tecnología Hydraclear® plus, que mantiene el lente hidratado durante todo el tiempo de uso: **comodidad**<sup>6,7</sup>
- Bajo coeficiente de fricción, cercano al de la córnea humana, lo que implica menor irritación del párpado superior en cada parpadeo y sensación de suavidad: **comodidad**<sup>7,9</sup>
- Flexibilidad equilibrada que permite una adecuada adaptación a la superficie ocular: **comodidad y facilidad de manipulación**<sup>6,7</sup>

\* www.clinicaltrials.gov es un sitio web mantenido por los NIH. Los 29 estudios clínicos evaluaron la comodidad subjetiva como criterio de valoración primario o secundario para la familia de dos semanas de la marca ACUVUE® OASYS y para ACUVUE® OASYS 1-day con tecnología HydraLuxe®. Revisión realizada el 25 de abril de 2021. **1.** Afirmación de CSM para la familia de lentes de contacto ACUVUE® OASYS (reutilizables de 2 semanas) y ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnología HydraLuxe®, utilizando ensayos clínicos citados en www.clinicaltrials.gov. **2. JVV Datos en Archivo 2018. Similitudes entre Mucina y Poli(N-Vinil Pirrolidona) (PVP).** **3.** ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBAO NETO, A.A., La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEARBM. 2009; 66 (33): 52-7. **4.** McIlraith, R.; Young, G.; Caza, C. Orientación de la lente tórica y agudeza visual en condiciones no estándar. Lente de contacto anterior del ojo, 2010; 33: 23-6. **5.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a la protección de la radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de los anteojos de sol con bloqueador UV, ya que los lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante. **6.** OSBORN, K & VEYS, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la sequedad relacionada con lentes de contacto. Parte 1 - Propiedades del material. Optician, 2005; 6004 (229): 39-41. **7.** Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalence of ocular surface symptoms, signs, and uncomfortable hours of wear in contact lens wearers: The effect of refitting with daily-wear silicone hydrogel lenses (Senofilcon A). Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de síntomas en la superficie ocular, signos y horas de uso incómodas en los usuarios de lentes de contacto: el efecto de la reparación con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). Eye & Contact Lens, 2006; 32 (6): 281-286. **8.** Comparado con 100% de oxígeno para los ojos sin lentes de contacto. **9.** Francés, K.; Jones, L. Una década con hidrogeles de silicona: Parte 1. Optometry Today, 2008; 48: 42-6.


## TECNOLOGÍA

- El Diseño de Estabilización por Parpadeo (DEP) utiliza la fuerza natural del parpadeo para mantener el lente en la posición correcta.
- Son cuatro zonas de estabilización que interactúan con los párpados durante el parpadeo, estabilizan el lente de contacto y proporcionan calidad y estabilidad visual.
- Espesor mínimo de los lentes bajo los párpados.<sup>1,2</sup>

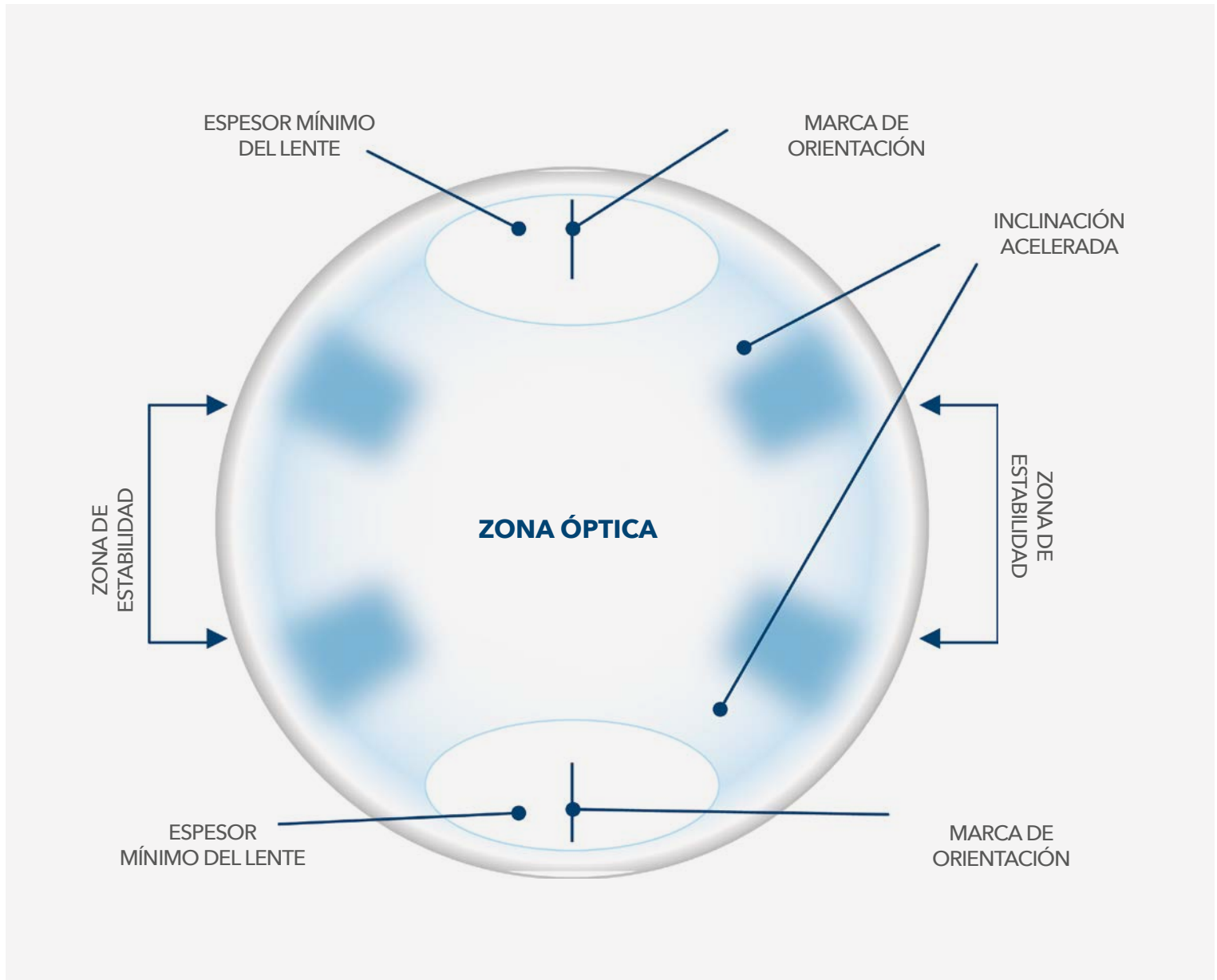


1. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÁO NETO, A.A., La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA.RBM. 2009; 66 (33): 52-7. 2. McIlraith, R.; Young, G.; Caza, C. Orientación de la lente tórica y agudeza visual en condiciones no estándar. Lente de contacto anterior del ojo, 2010; 33: 23-6.

## TECNOLOGÍA

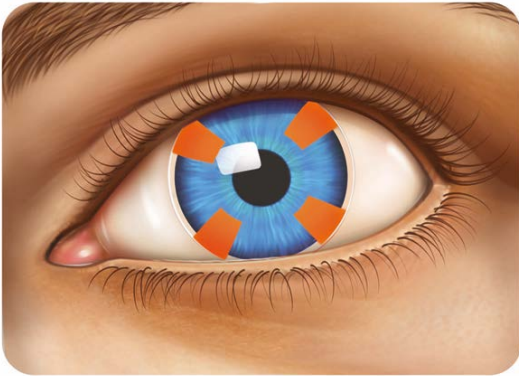

Cuatro zonas activas de estabilidad que interactúan positivamente con el parpadeo para mantener el lente en la posición correcta.<sup>1,2</sup>

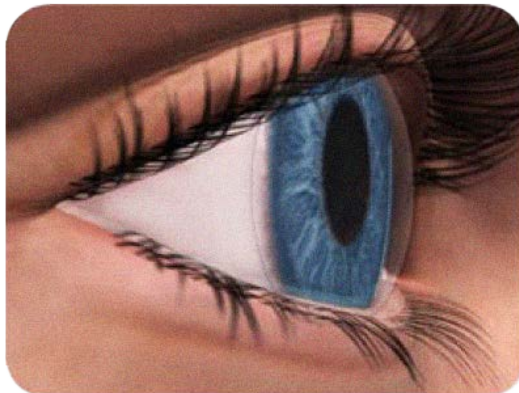

El lente es más fino bajo los párpados, y así mejora la sensación de comodidad y ofrece mayor estabilidad, independientemente del movimiento de los ojos.<sup>1,2</sup>



El lente se mantiene estable independientemente de la fuerza de gravedad y de los movimientos de los ojos en actividades dinámicas diarias, como posicionar la cabeza en 90°.<sup>1,2</sup>

1. ARIETA, C.E. ; ALVES, M.R. ; LOBÃO NETO, A.A., La importancia del mecanismo de estabilización en lentes de contacto gelatinosas. El Diseño de Estabilización Acelerada - DEA.RBM. 2009; 66 (33): 52-7. 2. McIlraith, R.; Young, G. ; Caza, C. Orientación de la lente tórica y agudeza visual en condiciones no estándar. Lente de contacto anterior del ojo, 2010; 33: 23-6.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Uso diario o extendido
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 6 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Astigmatismo

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.6
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.5
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	<p>Plano a -6,00D (pasos de 0,25D)            Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75            Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°)            Cilindro: -2,25, -2,75            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6,50D a -9,00D (pasos de 0,50D)            Cilindro: -0,75, -1,25            Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°)            Cilindro: -1,75, -2,25, -2,75            Ejes: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0,25D a +6,00D (pasos de 0,25D)            Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

### CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Senofilcon A Hidrogel de Silicona	AGENTE HUMECTANTE	HIDRACLEAR® PLUS <i>Interior del Lente</i>
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	38%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.69
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	129 x 10 <sup>-9</sup>	<b>TIENE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 1 (>99.9% UVB, >96.1% UVA)	<b>MARCA DE ORIENTACIÓN</b>	12h y 6h
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.08 (para -3.00D)	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO</b>	45
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	98%	<b>SUAVIDAD</b> <i>Coefficiente de fricción</i>	0.01

## ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HIDRACLEAR® PLUS

Los lentes de contacto ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS ahora pueden adaptar 99% de los pacientes con dioptrías esféricas o cilíndricas<sup>1,2</sup>

**NUEVO**

### PARÁMETROS

DIOPTRIAS ESFÉRICAS	MIOPIA Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D)					MIOPIA ELEVADA -6.50D A -9.00D (en pasos de 0.50D)					HIPERMETROPIA +0.25D A +6.00D (en pasos de 0.25D)				
	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75
EJES/ CILINDROS															
10°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30°	●	●	●			●	●								
40°	●	●	●			●	●								
50°	●	●	●			●	●								
60°	●	●	●			●	●								
70°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
80°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
90°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
100°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
110°	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●		
120°	●	●	●			●	●								
130°	●	●	●			●	●								
140°	●	●	●			●	●								
150°	●	●	●			●	●								
160°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
170°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

1. JJVC, datos en archivo 2014. ACUVUE OASYS® cubren hasta un 98,5% de las recetas esféricas y cilíndricas. ACUVUE OASYS®, HYDRACLEAR® e INNOVATION FOR HEALTHY VISION™ son marcas registradas de Johnson & Johnson Medical Ltd. © Johnson & Johnson Medical Ltd. 2014. 2. Holden, B.A (1975) Principios y práctica de la corrección del astigmatismo con lentes de contacto blandas. The Australian Journal of Opt., 58: 279-299.

● PARÁMETROS ACTUALES



## INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR® PLUS	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS													
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00
+ 5,50	+ 6,00														
+ 5,25	+ 5,50														
+ 5,00	+ 5,25														
+ 4,75	+ 5,00														
+ 4,50	+ 4,75														
+ 4,25	+ 4,50														
+ 4,00	+ 4,25														
+ 3,75	+ 4,00														
+ 3,50	+ 3,50														
+ 3,25	+ 3,25														
+ 3,00	+ 3,00														PRUEBA
+ 2,75	+ 2,75	cil		cil		cil		cil		cil		cil		cil	
+ 2,50	+ 2,50	-0,75		-1,25		-1,75		-2,25		-2,75		-2,25		-2,25	
+ 2,25	+ 2,25														
+ 2,00	+ 2,00														
+ 1,75	+ 1,75														
+ 1,50	+ 1,50														
+ 1,25	+ 1,25														
+ 1,00	+ 1,00														
+ 0,75	+ 0,75														
+ 0,50	+ 0,50														
+ 0,25	+ 0,25														

ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO DIOPTRIAS CILÍNDRICAS  
Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25 ■ -2,75 ■ cil -2,25



## INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).


DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR® PLUS	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS													
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00
Plano	Plano														
-0,25	-0,25														
-0,50	-0,50														
-0,75	-0,75														
-1,00	-1,00														
-1,25	-1,25														
-1,50	-1,50														
-1,75	-1,75														
-2,00	-2,00														
-2,25	-2,25														
-2,50	-2,50														
-2,75	-2,75														
-3,00	-3,00														
-3,25	-3,25														
-3,50	-3,50														
-3,75	-3,75														
-4,00	-4,00														<b>PRUEBA</b>
-4,25	-4,00		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>
-4,50	-4,25		<b>-0,75</b>		<b>-1,25</b>		<b>-1,75</b>		<b>-2,25</b>		<b>-2,75</b>		<b>-2,25</b>		<b>-2,25</b>
-4,75	-4,50														
-5,00	-4,75														
-5,25	-5,00														
-5,50	-5,00														
-5,75	-5,25														
-6,00	-5,50														
-6,25	-5,75														
-6,50	-6,00														
-6,75	-6,00														
-7,00	-6,50														
-7,25	-6,50														
-7,50	-6,50														
-7,75	-7,00														
-8,00	-7,00														
-8,25	-7,50														
-8,50	-7,50														
-8,75	-8,00														
-9,00	-8,00														
-9,50	-8,50														
-10,00	-9,00		<b>PRUEBE UN LENTE ESFÉRICO</b>												

ACUVUE® OASYS FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR® PLUS DIOPTRIAS CILÍNDRICAS  
Calculado para BVD = 12,0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25 ■ -2,75 ■ cil -2,25



**VISIÓN CLARA  
PARA TODAS LAS  
DISTANCIAS\*<sup>1</sup>**

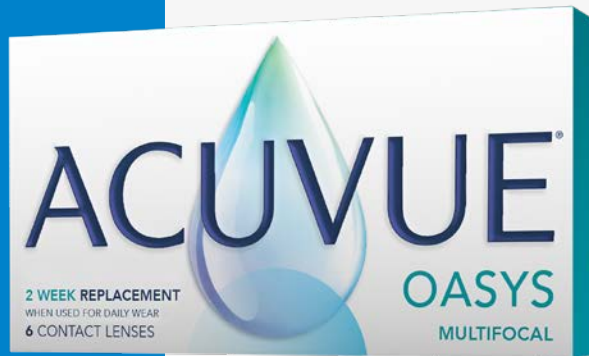

## ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL CON DISEÑO DE PUPILA OPTIMIZADA

### ● PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios prébitas existentes o nuevos de lentes de contacto, que buscan una visión clara en todas las distancias, de cerca, de lejos y en distancias intermedias.<sup>2</sup>


### ● BENEFICIOS

- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**<sup>3,4,7</sup>
- Material de hidrogel de silicona que permite el paso de 98% del oxígeno a la córnea: **salud ocular**<sup>3,4,7</sup>
- Alta protección uv en lentes de contacto: **salud ocular**<sup>5</sup>
- Bajo coeficiente de fricción, cercano al de la córnea humana, lo que implica menor irritación del párpado superior en cada parpadeo y sensación de suavidad: **comodidad**<sup>4,6</sup>
- Flexibilidad equilibrada que permite una adecuada adaptación a la superficie ocular: **comodidad y facilidad de manipulación**<sup>3,4</sup>
- Diseño EYE-INSPIRED™: un diseño centro-cerca esférico único para una adaptación precisa para el ojo présbita.

\*Comparado con el diseño anterior multifocal de JVC; tecnología optimizada para parámetros de error refractivo y potencia de adición en una multitud de distancias de visión y niveles de luz. **1.** JJV Datos de archivo 2020. ACUVUE PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY; JVC Contact Lenses, Design Features and Associated Benefits **2.** JJV Data on File 2020. ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN TECHNOLOGY; JVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits. **3.** OSBORN, K & VEYS, J. Una nueva lente de hidrogel de silicona para la sequedad relacionada con lentes de contacto. Parte 1 - Propiedades del material. Optician, 2005; 6004 (229): 39-41 **4.** Riley, C.; Young, G.; Chalmers, R. Prevalencia de superficie ocular. Síntomas, signos y horas de uso incómodas en usuarios de lentes de contacto: el efecto de reajustar con lentes de hidrogel de silicona de uso diario (Senofilcon A). Eye & Contact Lens, 2006; 32 (6): 281-286. **5.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen filtro UV Clase 1 o Clase 2 que ayuda a brindar protección contra la dañina transmisión de radiación UV a la córnea y a los ojos. Los lentes de contacto que absorben los rayos UV no sustituyen el uso de anteojos de sol con bloqueador UV, y que las lentes no cubren completamente el ojo ni el área circundante. **6.** Francés, K.; Jones, L. Una década con hidrogeles de silicona: Parte 1. Optometría de hoy. 2008; 48: 42-6. **7.** Comparado con 100% de oxígeno para los ojos sin lentes de contacto.

# TECNOLOGÍA

Con diseño de pupila optimizada para el ojo presbita EL LENTE MULTIFOCAL optimiza el diseño óptico de acuerdo a la variación natural del tamaño de la pupila, la edad y la potencia de refracción, con el fin de brindar una experiencia superior para más pacientes. \*1

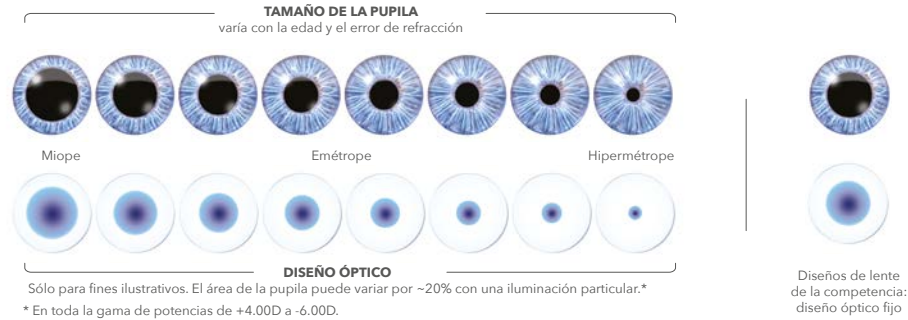

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Diario o extendido
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 6 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Presbicia

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.4
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.3
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	-9.00 a +6.00 (en pasos de 0.25 D)
<b>ADICCIÓN</b>	LOW +0.75 a +1.25 MID +1.50 a +1.75 HIGH +2.00 a +2.50

### CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL</b>	Senofilcon A	<b>AGENTE HUMECTANTE</b> <i>Interior del Lente</i>	Hydraclear® Plus
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	38%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.69
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	147 x 10 <sup>-9</sup> (-3.00D)	<b>TIENE VISIBILIDAD</b>	Si
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 1 (99.9% UVB, 96.1% UVA)	<b>SUAVIDAD</b> <i>Coefficiente de fricción</i>	< 0.018
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.07 (para -3.00D)	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO</b>	45
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	98% (ojo abierto), 96% (ojo cerrado)	<b>INDICADOR DE DERECHO -REVÉS</b>	Si

\*Comparado con el diseño anterior multifocal de JJVC; tecnología optimizada para parámetros de error refractivo y potencia de adición en una multitud de distancias de visión y niveles de luz. 1. JJV datos en archivo 2021. TECNOLOGÍA DE DISEÑO DE PUPILA OPTIMIZADA de ACUVUE®: Lentes de contacto de JJVC, características del diseño y beneficios asociados.

**HIDRATACIÓN  
Y COMODIDAD  
DURANTE TODO  
EL MES DE USO<sup>2</sup>**



## ACUVUE® VITA™

### ⦿ PERFIL DEL USUARIO

Para pacientes que desean el esquema de reemplazo y asequibilidad de un lente mensual, pero quieren evitar la pérdida de comodidad a lo largo del mes<sup>1</sup>

### ⦿ BENEFICIOS


- Maximizan y mantienen la hidratación en todo el lente, mientras que brinda comodidad y visión superiores del día 1 al día 30.<sup>1</sup>
- Hasta 21 % mayor comodidad todo el mes que otras marcas líderes de reemplazo mensual.\*<sup>2</sup>
- La familia de lentes ACUVUE® VITA® tiene visión superior durante todo el mes comparada con otras marcas líderes de reemplazo mensual.\*<sup>2,3</sup>

\*Lentes de contacto de reemplazo mensual líderes: Air Optix® Aqua, Biofinity® y Ultra® superior "calidad de visión general" basado en un análisis predeterminado de todas las respuestas de los pacientes en una escala de 5 puntos. Las calificaciones reflejan las dos principales respuestas ("excelente/muy bueno") usadas en el análisis. **1.** JJV datos en archivo 2017. Definición de la Tecnología HydraMax® **2.** JJV datos en archivo 2016. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=533 usuarios de LCB blandos de hidrogel de silicona en EE.UU. **3.** JJV datos en archivo 2017. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=226 usuarios de LCB tóricos en EE.UU.

## TECNOLOGÍA

La tecnología HydraMax™ es un lente de hidrogel de silicona sin recubrimiento de superficie cuya fórmula se ha calculado para ayudar a maximizar y mantener la hidratación.<sup>1</sup>

EYE-INSPIRED™ DESIGN

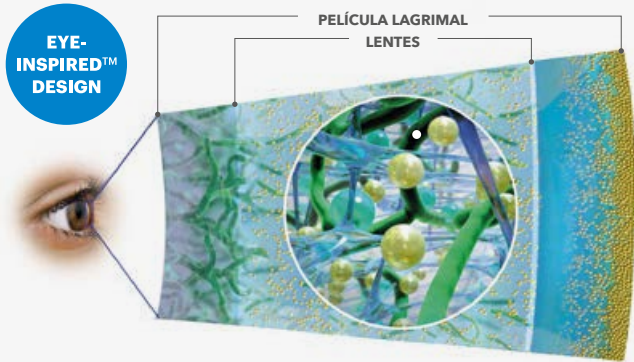

**LA HIDRATACIÓN SE MAXIMIZA** incorporando la máxima cantidad de agente hidratante en esta lente.

**LA HIDRATACIÓN SE MANTIENE** con una distribución y densidad óptima de lípidos beneficiosos en el interior de la lente.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Diario
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Mensual
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 6 unidades
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Miopía e hipermetropía

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.4
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.0
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D + 0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D + 6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

### CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL</b>	Senofilcon C	<b>AGENTE HUMECTANTE</b> <i>Interior del Lente</i>	HydraMax™
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	41%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.77
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	147 x 10 <sup>-9</sup> para una lente de -3.00D	<b>TIENE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>PROTECCIÓN UV*</b>	Clase 1 (99.8% UVB, 93.4% UVA)	<b>INDICADOR DERECHO - REVÉS</b>	Si, 123
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.07 (para -3.00D)	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO</b>	55
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	98% (ojo abierto)	<b>SUAVIDAD</b>	0.01

\*Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV de Clase 1 o de Clase 2 para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones de UV medidas en una lente de -1.00D. Datos de archivo JJVC 2012. 1. JJV Data on File 2017. HydraMax Technology Definition.

**HIDRATACIÓN  
Y COMODIDAD  
DURANTE TODO  
EL MES DE USO,  
MANTENIENDO  
LA VISIÓN CLARA  
Y ESTABLE<sup>1,2</sup>**



## ACUVUE® VITA™ PARA ASTIGMATISMO

### ● PERFIL DEL USUARIO

Usuario actual de lentes de contacto de reemplazo mensual que tiene astigmatismo y que busca un lente que brinde una visión clara y estable 1 y una comodidad superior todo el mes<sup>1,2</sup>

### ● BENEFICIOS

- Visión clara, cómoda y estable todo el día con el Diseño de ESTABILIZACIÓN POR PARPADEO de ACUVUE®.<sup>3</sup>
- Maximizan y mantienen la hidratación en todo el lente para una comodidad y visión excepcionales<sup>1,4</sup>
- Brindan comodidad excepcional y confiable todo el mes<sup>5</sup>


1. JJV datos en archivo 2017. Definición de la Tecnología HydraMax® 2. JJV datos en archivo 2018. Diseño de lentes de contacto ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO. 3. JJV datos en archivo 2021. Lentes de contacto ACUVUE® para ASTIGMATISMO - Éxito general en la adaptación, posición de la orientación, estabilidad rotacional y desempeño de la visión. 4. JJV datos en archivo 2016. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=533 usuarios de LCB blandos de hidrogel de silicona en EE.UU. 5. JJV datos en archivo 2017. Estudio de dispensación de 30 días, reemplazo mensual uso diario con n=108 usuarios de LCB tóricos en EE.UU.

# TECNOLOGÍA

2 diseños innovadores en comodidad y visión - en un lente mensual

## HydraMax™ Technology<sup>1</sup>

Es una nueva fórmula de hidrogel de silicona sin recubrimiento de superficie que se ha calculado para ayudar a maximizar y mantener la hidratación en el lente para una comodidad excepcional y de confianza durante todo el mes<sup>2</sup>

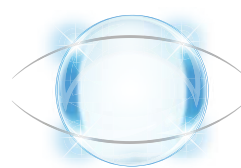

## Diseño EYELID STABILISED<sup>3</sup>

Este diseño se adapta de forma natural al parpadeo de los ojos, ayudando a mantener la lente en la posición correcta<sup>3</sup>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD

<b>USO</b>	Diario
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Mensual
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 6 unidades
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Miopía e hipermetropía

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.6
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.5
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	<p>Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D)            Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75,            Ejes: 10° a 180° (en incrementos de 10°)            Cilindros: -2,25            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D)            Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p> <p>De +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D)            Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75            Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°</p>

### CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL</b>	Senofilcon C	<b>AGENTE HUMECTANTE</b> <i>Interior del Lente</i>	HydraMax™
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	41%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.77
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	147 x 10 <sup>-9</sup> para una lente de -3.00D	<b>TIENE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>PROTECCIÓN UV*</b>	Clase 1 (99.8% UVB, 93.4% UVA)	<b>MARCA DE ORIENTACIÓN</b>	12h y 6h
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.07 (para -3.00D)	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DÍNAMICO</b>	55
<b>FLUJO DE OXÍGENO</b>	98% (ojo abierto)	<b>SUAVIDAD</b>	0.01

\*Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV de Clase 1 o de Clase 2 para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Los lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. Transmisiones de UV medidas en un lente de -1.00D. Datos de archivo JJVC 2012. **1.** Datos de archivo JJVC 2017, Desempeño subjetivo y resultados clínicos de ACUVUE® VITA™ Brand Contact Lenses with HydraMax™ Technology for ASTIGMATISM; **2.** Datos de archivo JJVC 2016, HydraMax™ Technology; **3.** Datos de archivo JJVC 2017, Éxito general de adaptación de las lentes de contacto ACUVUE® para astigmatismo, orientación correcta, estabilización rotacional y rendimiento visual.



## ACUVUE® VITA™ PARA ASTIGMATISMO

POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		POTENCIAS NEGATIVAS CLAVES			
		Plano a -6.00 en pasos de 0.25D			
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25
OBLICUO	30°	•	•	•	
	40°	•	•	•	
	50°	•	•	•	
	60°	•	•	•	
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•	•
	80°	•	•	•	•
	90°	•	•	•	•
	100°	•	•	•	•
	110°	•	•	•	•
OBLICUO	120°	•	•	•	
	130°	•	•	•	
	140°	•	•	•	
	150°	•	•	•	
	160°	•	•	•	•
CON LA REGLA	170°	•	•	•	•
	180°	•	•	•	•
	10°	•	•	•	•
	20°	•	•	•	•

POTENCIAS ESFÉRICAS (DE)		POTENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS ALTAS		
		-6,50 a -9,00 en pasos de 0,50D   +0.25 a +4.00 en pasos de 0.25D		
POTENCIAS CILÍNDRICAS (DC)		-0.75	-1.25	-1.75
OBLICUO	30°			
	40°			
	50°			
	60°			
CONTRA LA REGLA	70°	•	•	•
	80°	•	•	•
	90°	•	•	•
	100°	•	•	•
	110°	•	•	•
OBLICUO	120°			
	130°			
	140°			
	150°			
	160°	•	•	•
CON LA REGLA	170°	•	•	•
	180°	•	•	•
	10°	•	•	•
	20°	•	•	•

● PARÁMETROS ACTUALES

## INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS									
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	
Plano	Plano										
-0,25	-0,25										
-0,50	-0,50										
-0,75	-0,75										
-1,00	-1,00										
-1,25	-1,25										
-1,50	-1,50										
-1,75	-1,75										
-2,00	-2,00										
-2,25	-2,25										
-2,50	-2,50										
-2,75	-2,75										
-3,00	-3,00										
-3,25	-3,25										
-3,50	-3,50										
-3,75	-3,75										
-4,00	-4,00										
-4,25	-4,00		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		<b>cil</b>		
-4,50	-4,25		<b>-0,75</b>		<b>-1,25</b>		<b>-1,75</b>		<b>-2,25</b>		
-4,75	-4,50										
-5,00	-4,75										
-5,25	-5,00										
-5,50	-5,00										
-5,75	-5,25										
-6,00	-5,50										
-6,25	-5,75										
-6,50	-6,00										
-6,75	-6,00										
-7,00	-6,50										
-7,25	-6,50										
-7,50	-6,50										
-7,75	-7,00										
-8,00	-7,00										
-8,25	-7,50										
-8,50	-7,50										
-8,75	-8,00										
-9,00	-8,00										
-9,50	-8,50										
-10,00	-9,00		<b>PRUEBE UN LENTE ESFÉRICO</b>								

ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM DIOPTRIAS CILÍNDRICAS  
Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75 ■ -2,25



## INSTRUCCIONES

Para seleccionar el lente de prueba apropiado ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM, realice una referencia cruzada de las dioptrías esféricas para anteojos del paciente (en la columna de la izquierda) con sus dioptrías cilíndricas para anteojos (en la parte superior).

DIOPTRIAS ESFÉRICAS EN ANTEOJOS	ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM	DIOPTRIAS CILÍNDRICAS EN ANTEOJOS					
		-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00
+4,00	+4,25						
+3,75	+4,00						
+3,50	+3,50						
+3,25	+3,25						
+3,00	+3,00						
+2,75	+2,75		<b>cil</b>	<b>cil</b>		<b>cil</b>	
+2,50	+2,50		<b>-0,75</b>	<b>-1,25</b>		<b>-1,75</b>	
+2,25	+2,25						
+2,00	+2,00						
+1,75	+1,75						
+1,50	+1,50						
+1,25	+1,25						
+1,00	+1,00						
+0,75	+0,75						
+0,50	+0,50						
+0,25	+0,25						

ACUVUE® VITA™ FOR ASTIGMATISM DIOPTRIAS CILÍNDRICAS  
Calculado para BVD = 12.0 mm

■ -0,75 ■ -1,25 ■ -1,75



**VISIÓN CLARA CON  
UNA GRAN RELACIÓN  
CALIDAD-PRECIO<sup>1</sup>**



## ACUVUE® 2

### ● PERFIL DEL USUARIO

Para usuarios con miopía o hipermetropía. Ideales para quienes no se adaptan a lentes de contacto de hidrogel de silicona.

### ● BENEFICIOS


- Fácil manipulación.
- Amplia gama de parámetros.
- Lentes ultra finos para una visión cómoda.
- Protección UV clase 2: **salud ocular.**

1. JJV Datos en Archivo 2018. Declaraciones de la Marca Principal ACUVUE® sobre el Rendimiento Clínico y las Propiedades Generales del Material.

## TECNOLOGÍA

Diseño con altura de bordes reducida:

- Facilita el paso de la lágrima.
- Reduce el roce del párpado con el lente durante el parpadeo

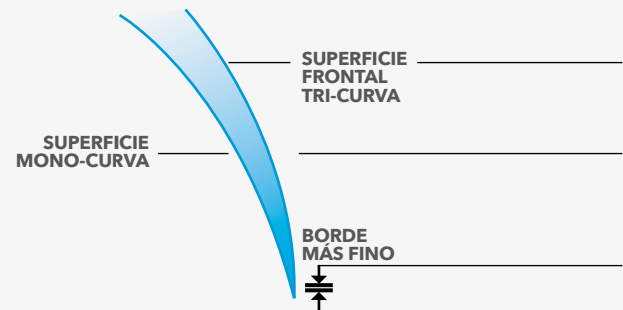

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MODALIDAD








<b>USO</b>	Uso diario o extendido
<b>PROGRAMA DE REEMPLAZO</b>	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
<b>PRESENTACIÓN</b>	Caja con 6 lentes
<b>ERROR DE REFRACCIÓN</b>	Miopía e hipermetropía

### PARÁMETROS

<b>CURVA BASE mm</b>	8.7 (a pedido 8.3)
<b>DIÁMETRO TOTAL mm</b>	14.0
<b>DIOPTRÍAS DISPONIBLES</b>	-0.50D a -6.00D en pasos de 0.25D -6.50D a -12.00D en pasos de 0.50D +0.50D a +6.00D en pasos de 0.25D +6.50D a +8.00D en pasos de 0.50D

### CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL</b>	Etafilicon A Hidrogel	<b>AGENTE HUMECTANTE</b> <i>Interior del Lente</i>	No posee
<b>CONTENIDO DE AGUA</b>	58%	<b>FLEXIBILIDAD</b> <i>Módulo MPa</i>	0.27
<b>TRANSMISIBILIDAD</b> <i>Dk/t central</i>	25.5 x 10 <sup>-9</sup>	<b>ÁNGULO DE CONTACTO DINÁMICO</b>	63
<b>PROTECCIÓN UV</b>	Clase 2 (99% UVB, 88% UVA)	<b>TINTE DE VISIBILIDAD</b>	Si (azul claro)
<b>ESPESOR CENTRAL mm</b>	0.084 (para -3.00D)	<b>INDICADOR DERECHO - REVÉS</b>	Si, 123

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	 <b>ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™</b>	 <b>1-DAY ACUVUE® MOIST®</b>	 <b>1-DAY ACUVUE® MOIST® PARA ASTIGMATISMO CON LACREON® (ETAFILCON A)</b>	 <b>ACUVUE® OASYS CON HYDRACLEAR® PLUS</b>
<b>Programa de Reemplazo</b>	Diario	Diario	Diario	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
<b>Uso</b>	Uso Diario	Uso Diario	Uso Diario	Uso diario o extendido
<b>Presentación</b>	Pack x 30 unidades	Pack x 30 unidades	Pack x 30 unidades	Pack x 6 unidades
<b>Agente Humectante</b>	HydraLuxe™	LACREON®	LACREON®	HYDRACLEAR® PLUS
<b>Material</b>	Senofilcon A	Etafilcon A	Etafilcon A	Senofilcon A
<b>Transmisibilidad Dk/t<sup>1</sup> (borde corregido)</b>	121 x 10 <sup>-9</sup>	25.5 x 10 <sup>-9</sup>	23.8 x 10 <sup>-9</sup>	147 x 10 <sup>-9</sup>
<b>Contenido de Agua</b>	38%	58%	58%	38%
<b>Tinte de visibilidad</b>	Si	Si	Si	Si
<b>Protección UV†‡</b>	Clase 1 96% UVA, >99.9% UVB	Clase 2 85% UVA, 99% UVB	Clase 2 85% UVA, 99% UVB	Clase 1 96.1% UVA, 99.99% UVB
<b>Indicador Derecho-Revés</b>			No	
<b>Marca de Orientación</b>	No	No	Vertical	No
<b>Espesor Central mm -3.00 D</b>	0.085 mm (nominal para -3.00D)	0.084 mm (nominal para -3.00D)	0.090 mm (nominal para -3.00D)	0.070 (nominal para -3.00D)
<b>Curva Base mm</b>	8.5	8.5 negativo y 9.0 positivo	8.5	8.4
<b>Parámetros BC (mm) / Diámetro (mm) Rango de poder (D)</b>	8.5/14.3 -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D) +6.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D)	8.5/14.2 -0.50D a -12.00D +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.50D sobre -6.00D) 9.0/14.2 +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.50D sobre -6.00D)	8.5/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.4/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D sobre ±6.00D)

†Ayuda a proteger la córnea y el ojo de los nocivos rayos UV. ‡NOTA: La exposición a largo plazo a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados con las cataratas. La exposición se basa en una serie de factores, tales como las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con bloqueador UV ayudan a proporcionar protección contra la radiación UV perjudicial. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contactos con bloqueador UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos de la visión. Consulte a su profesional de la visión para obtener más información.

 <p><b>ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR® PLUS</b></p>	 <p><b>ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL</b></p>	 <p><b>ACUVUE® VITA™</b></p>	 <p><b>ACUVUE® VITA™ PARA ASTIGMATISMO</b></p>	 <p><b>ACUVUE® 2</b></p>
Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Uso diario, reemplazo mensual	Uso diario, reemplazo mensual	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
Uso diario o extendido	Diario o Extendido	Uso diario	Uso diario	Uso diario o extendido
Pack x 6 unidades	6 Pack	Pack x 6 unidades	Pack x 6 unidades	Pack x 6 unidades
HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS	HydraMax™	HydraMax™	
Senofilcon A	Senofilcon A	Senofilcon C	Senofilcon C	Etafilcon A
129 x 10 <sup>-9</sup>	147 x 10 <sup>-9</sup> (-3.00 D)	147 x 10 <sup>-9</sup>	129 x 10 <sup>-9</sup>	25.5 x 10 <sup>-9</sup>
38%	38%	41%	41%	58%
Si	Si	Si	Si	Si
Clase 1 96.1% UVA, 99.99% UVB	Clase 1 96.1% UVA, 99.99% UVB	Clase 1 93.4% UVA, 99.8% UVB	Clase 1 93.4% UVA y 99.8% UVB	Clase 2 88% UVA, 99% UVB
No			No	
Vertical	No	No	Vertical	No
0.080 (nominal para -3.00D)	0.07	0.07 (nominal para -3.00D)	0.08	0.084 (nominal para -3.00D)
8.6		8.4	8.4	8.7
Plano a -6,00D (pasos de 0,25D) Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75 Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°) Cilindro: -2,25, -2,75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°  De -6,50D a -9,00D (pasos de 0,50D) Cilindro: -0,75, -1,25 Ejes: 10° a 180° (incrementos de 10°) Cilindro: -1,75, -2,25, -2,75 Ejes: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°  De +0,25D a +6,00D (pasos de 0,25D) Cilindro: -0,75, -1,25, -1,75 Ejes: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.4/14.3 -9.00D a +6.00D (en pasos de 0.25D)  ADDS: LOW: +0.75D a +1.25D MID: +1.50D a +1.75D HIGH: +2.00D a +2.50D	8.4/14.0 -0.50 a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D) +6.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D)	8.6/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°  Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°  -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.7/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D sobre ±6.00D)

Ingresa hoy a nuestra  
red profesional  
JNJ VISION PRO



Conocé más  
[jnvisionpro.com.ar](http://jnvisionpro.com.ar)

# ACUVUE®

[www.jnvisionpro.com.ar](http://www.jnvisionpro.com.ar)

 /ACUVUEPROAR

**MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.** Los lentes de contacto ACUVUE® son indicados para la corrección de la visión. Como ocurre con todos los lentes de contacto, pueden desarrollar problemas oculares, inclusive úlceras de córnea. Los lentes no deben ser prescritos si los pacientes tienen inflamación o infección alrededor o dentro de los ojos o párpados, cualquier enfermedad, lesión o anomalía ocular que afecte la córnea, la conjuntiva o los párpados, cualquier afección diagnosticada previamente que hace que el uso de lentes de contacto resulte incómodo, ojo seco severo, sensibilidad corneal reducida, cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar el ojo o empeorar al usar lentes de contacto, Reacciones alérgicas en la superficie del ojo o en los tejidos adyacentes que puedan inducirse o empeorarse al usar lentes de contacto o soluciones para lentes de contacto, cualquier infección ocular activa, si los ojos se ponen rojos o irritados. Producto de uso bajo prescripción de profesional de la salud. Para más información sobre uso, cuidado de mantenimiento y seguridad consulte a un profesional de la visión, llame al centro de atención al cliente 0800-444-2604, visite [www.acuvue.com.ar](http://www.acuvue.com.ar), escribanos a [contactenos.ar@acuvue.com](mailto:contactenos.ar@acuvue.com) o consulte la Guía de Instrucciones para el usuario. Johnson & Johnson de Argentina S.A.C e I. CUIT 30-50057230-9. Mendoza 1259, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1428DJG). **ADVERTENCIA:** LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN DE RAYOS UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción de rayos UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción de rayos UV, según lo indicado. **ACUVUE®; ACUVUE OASYS® CON HYDRACLEAR® PLUS; ACUVUE OASYS® PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR® PLUS; 1-DAY ACUVUE® MOIST; 1-DAY ACUVUE® MOIST PARA ASTIGMATISMO CON LACREON® (ETAFILCON A), ACUVUE® OASYS 1-DAY WITH HYDRALUXE™; ACUVUE® VITA™; ACUVUE® VITA™ para ASTIGMATISMO; ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL; ACUVUE® 2; EYE INSPIRED™; INTUISIGHT™** son marca registrada de Johnson & Johnson Vision Care, Inc. © Johnson & Johnson de Argentina S.A.C. e I. 2023. Todos los derechos reservados.