

Din hurtige og nemme guide til vellykket multifokal tilpasning



ACUVUE® MULTIFOCAL familien.
Produktbilleder er kun til illustrative formål.

1

UDFØR EN NY BRILLEREFRAKTION

- Cylinder $\leq -0.75D$:
Tilpas med **MULTIFOCAL**
- Cylinder $-1.00D$ og $-1.25D$:
Tilpas med **MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**
- Cylinder $-1.50D$ og $-1.75D$:
Tilpas med **MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**, med et tillæg på $-0.25D$ til den sfæriske styrke

2

BESTEM DET SENSORISK DOMINANTE ØJE

Beregn derefter toppunktsafstanden for både sfærisk og cylinderstyrke.
Få hjælp fra ACUVUE® Simplifit til denne beregning og find styrken på prøvelinserne.

jnvisionpro.com/en-dk/calculators/acuvue-fitting-calculator

3

BESTEM DEN FUNKTIONELLE ADD

ACUVUE®
simplifit
Your digital fitting consultant



ØJE	ADD	FØRSTE VALG AF KONTAKTLINSE	FORBEDRING AF AFSTANDSSYN	FORBEDRING AF NÆRSYN
Dominante øje	+0.75D til +1.25D	☒ LOW	SFÆRISK ELLER TORISK	☒ LOW
Ikke-dominante øje		☒ LOW		☒ LOW +0.25D på afstandsstyrken
Dominante øje	+1.50D til +1.75D	☐ MID	☒ LOW	☐ MID
Ikke-dominante øje		☐ MID	☐ MID	☐ MID +0.25D på afstandsstyrken
Dominante øje	+2.00D til +2.50D	☐ MID	☐ MID	☐ MID
Ikke-dominante øje		☒ HIGH	☐ MID +0.25D på afstandsstyrken	☒ HIGH +0.25D på afstandsstyrken

SAMMENFATNING AF HVORDAN DU KAN MODIFICERE DET FØRSTE PAR PRØVELINSER

For at forbedre **AFSTANDSSYNET**:

- Ved LOW ADD, fjern ADD på det dominante øje
- Ved MID ADD, sænk ADD på det dominante øje
- Ved HIGH ADD, sænk ADD på det ikke-dominante øje og tilføj +0.25D til den sfæriske styrke

For at forbedre **NÆRSYNET**:


- Tilføj +0.25D til det ikke-dominante øje

For at forbedre **AFSTANDSSYNET** og **NÆRSYNET** ved bygningsfejl:

- Hvis kunden har en cylinder på $-0.75D$, overvej at bruge MULTIFOCAL for ASTIGMATISM
- Juster aksens position, hvis rotationen er ≥ 10 grader, og der er mistanke om, at det påvirker synet negativt



Smarte tips og råd ved tilpasning

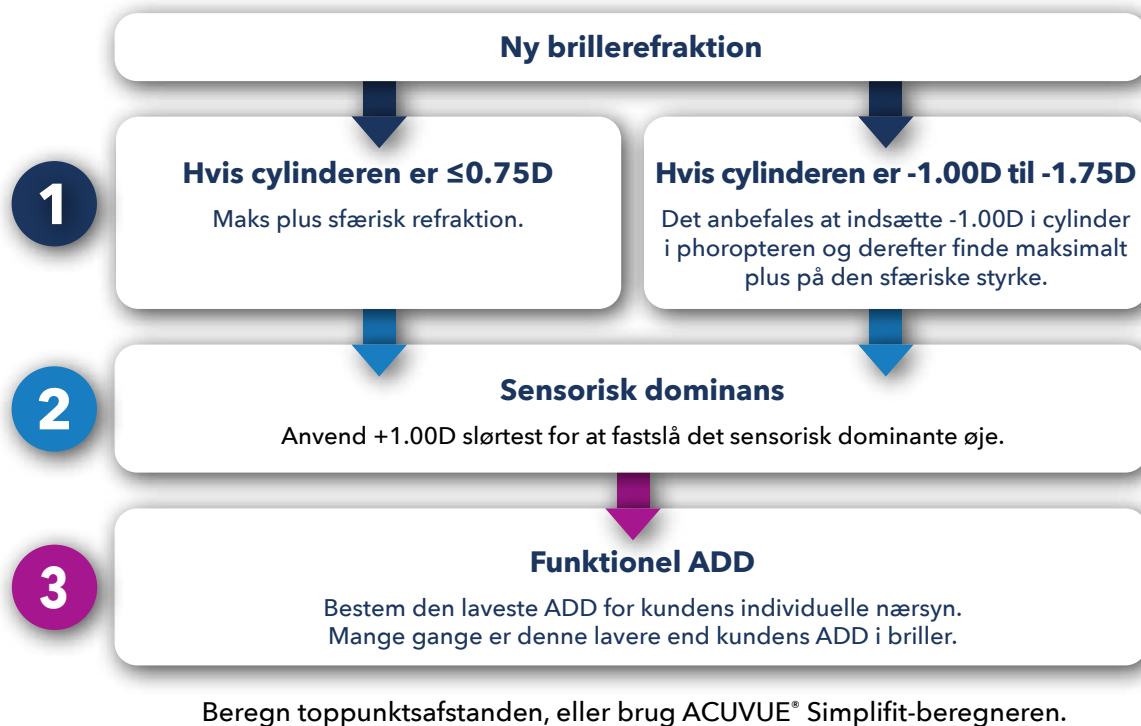

Smarte tips og råd, når du taler med kunden

- 1** Indsæt styrkerne fra trin 1 i prøvebrillen og bed kunden om at kigge ud gennem butiksvinduet. Placer $+0.25D$ binokulært foran prøvebrillen.
- 2** Kunden har styrkerne fra trin 1 i prøvebrillen og kigger på synstavlen.
- 3** Kunden bruger prøvebrillen med afstandsstyrkerne fra trin 1.



"Mærker du forskel med disse glas?"

Hvis der ikke er nogen forskel, eller kunden er tøvende, lægges de $+0.25D$ til den sfæriske afstandsstyrke.

"Jeg vil nu sløre det en smule for dig. Fortæl mig, hvor glasset generer dig mest"

Placer $+1.00D$ skiftevis foran hvert øje. **Det øje, der er mest forstyrret, er sensorisk dominant.**

"Se på din mobiltelefon"

Uanset alder, start med at tjekke om LOW ADD fungerer. **Hvis kunden kan læse på en behagelig afstand, har du fundet den rigtige ADD.** Det er ikke nødvendigt at sammenligne med MID ADD, hvis kunden er tilfreds.

Billederne er kun til illustrative formål.

Beregneren og denne tilpasningsvejledning leveres til optikere som en hjælp i forbindelse med tilpasning af ACUVUE® MULTIFOCAL kontaktlinser og erstatter ikke professionel vurdering.

Vigtig sikkerhedsinformation: ACUVUE® kontaktlinser er indikeret til synkorrektion. Som ved alle kontaktlinser kan der opstå øjenproblemer, inklusive sår på hornhinden. Nogle brugere kan opleve let irritation, kløe eller ubehag. Kontaktlinser bør ikke anvendes, hvis der er øjeninfektioner eller andre øjenlidelser, eller hvis der er en systemisk sygdom, der kan påvirke øjet. For detaljeret produktinformation, herunder kontraindikationer, forholdsregler og bivirkninger, læs brugsanvisningen på Johnson & Johnson hjemmeside <https://www.e-ifu.com/>. For yderligere information besøg vores Johnson & Johnson hjemmeside www.jnjvisioncare.dk.

© Johnson & Johnson Vision Care Ireland Unlimited Company (UC) 2025. ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL og ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM er varemærker tilhørende Johnson & Johnson. 2025PP12879. VIS-250146-2_Da