

Suggerimenti per un'applicazione di successo

SEGUI 3 SEMPLICI PASSAGGI

1 Esegui una nuova refrazione sfero-cilindrica

Applica la correzione al vertice oppure utilizza **ACUVUE® SIMPLIFIT**.

- Cilindro $\leq -0.75D$: applica le lenti **ACUVUE® Multifocali**.
- Cilindro $-1.00D$ e $-1.25D$: applica **ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM**
- Cilindro $-1.50D$ e $-1.75D$: applica **ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM** aggiungendo un extra $-0.25D$ al potere sferico.

2 Determina l'occhio dominante

Usa il test dello sfocamento con la lente $+1.00D$ per determinare la dominanza sensoriale.



3 Determina l'ADD funzionale

Determina l'addizione funzionale a una buona visione da vicino. Prescrivere un'addizione eccessiva potrebbe impattare la visione da lontano.

Utilizza **ACUVUE® SIMPLIFIT** il nuovo calcolatore digitale che unisce l'**ASTIGMATISM Calculator** e il **MULTIFOCAL Calculator** in un unico strumento per aiutarti ad aumentare l'efficienza e la precisione nel trovare le lenti di prova adatte ai tuoi portatori.

SELEZIONARE LE LENTI INIZIALI		
ADD	OCCHIO	SELEZIONE LENTE
+0.75D a +1.25D	Occhio dominante	LOW
	Occhio non dominante	LOW
+1.50D a +1.75D	Occhio dominante	MID
	Occhio non dominante	MID
+2.00D a +2.50D	Occhio dominante	MID
	Occhio non dominante	HIGH



Far provare la lente per 10 minuti nel mondo reale (fuori dalla sala di misurazione) prima di valutare le prestazioni visive

MIGLIORARE LA VISIONE	
MIGLIORAMENTO VISIONE DA LONTANO	MIGLIORAMENTO VISIONE DA VICINO
SFERICA O TORICA	LOW
LOW	LOW +0.25D al potere da lontano
LOW	MID
MID	MID +0.25D al potere da lontano
MID	MID
MID +0.25D al potere da lontano	HIGH +0.25D al potere da lontano

Per migliorare la visione da lontano:

- Per addizioni da +0.75D a +1.75D abbassare l'ADD nell'occhio dominante.
- Per addizioni da +2.00D a +2.50D, abbassare l'ADD nell'occhio non dominante e aggiungere +0.25D al potere da lontano.

Per migliorare la visione da vicino:

- Aggiungere +0.25D al potere da lontano nell'occhio non dominante.

Per migliorare la visione da lontano e da vicino:

- Se il portatore ha un cilindro di -0.75D, considerare di applicare ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL for ASTIGMATISM.
- Regolare l'asse se la rotazione è $\geq$ di 10 gradi e si sospetta che la rotazione influisca negativamente sulla visione.

I calcolatori sono a disposizione degli ottici come strumenti di supporto, da utilizzare in associazione alle indicazioni presenti sulle lenti a contatto ACUVUE® MULTIFOCAL, e non costituiscono un sostituto del giudizio professionale.

Informazioni importanti sulla sicurezza: le lenti a contatto ACUVUE® sono indicate per la correzione della vista. Come con tutte le lenti a contatto, potrebbero insorgere problemi oculari, incluse ulcere corneali. Alcuni utilizzatori potrebbero sviluppare lieve irritazione, prurito o disagio. Le lenti a contatto non devono essere utilizzate in caso di infezioni o altri problemi oculari, o in caso di una patologia sistemica che può colpire l'occhio. Per informazioni dettagliate sul prodotto, tra cui controindicazioni, precauzioni e reazioni avverse, consulta le Istruzioni per l'uso disponibili sul sito web www.e-ifu.com. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Johnson & Johnson Vision www.jnjvisionpro.com/it-it

ACUVUE® è un marchio registrato della Johnson & Johnson. © Johnson & Johnson 2025. | 2025PP12147 v2

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL'OTTICO